

LIEFERUMFANG

Standard-Matratzenauflage inkl. Trikotbezug	Standard-Matratzenauflage inkl. schwer entzündbarem Trikotbezug	Standard-Matratzenauflage ohne Bezug
1x Standard-Matratzenauflage 4/5 cm	1x Standard-Matratzenauflage 4/5 cm	1x Standard-Matratzenauflage 4/5 cm
1x Trikotbezug (<i>abnehmbar</i>)	1x Trikotbezug (<i>abnehmbar</i>)	1x Gebrauchsanleitung
1x Gebrauchsanleitung	1x Gebrauchsanleitung	1x Folienverpackung
1x Folienverpackung	1x Folienverpackung	

SICHERHEITSHINWEISE

Das Rauchen und Anwenden einer Flammquelle in unmittelbarer Nähe sollte vermieden werden.

KONSULTATION EINES ANGEHÖRIGEN
DER GESUNDHEITSBERUFE, MELDEPFLICHT

Wenn Ihnen die Anwendung des Produktes nicht geläufig sein sollte und Sie beim Einsatz Hilfestellung benötigen, steht Ihnen unser Fachpersonal für Rückfragen gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne.

Bei allergischen Reaktionen auf der Haut konsultieren Sie einen Arzt. Bitte beachten Sie, dass alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden sind. Schwerwiegende Vorfälle im Sinne des Gesetzes sind alle unerwünschten Ereignisse, die eine der nachstehenden Folgen hatten: Tod, lebensbedrohliche Erkrankung oder Verletzung, bleibende Körperschäden, chronische Erkrankungen oder fötale Gefährdung.

WARTUNG DURCH DEN ANWENDER

Grundsätzlich muss keine Wartung durch den Anwender durchgeführt werden.

HERSTELLUNG UND VERTRIEB



KUBIVENT Standard-Matratzenauflagen werden ausschließlich von der Firma **KUBIVENT** Sitz- und Liegepolster GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben.

Die Matratzen sind Medizinprodukte der Klasse I und als solche CE-gekennzeichnet.



STANDARD-PFLEGEMATRATZEN

Gebrauchsanleitung KUBIVENT Standard-Matratzenauflage

PU-Schaumauflage



EINSATZBEREICHE UND ZWECKBESTIMMUNG

Die **KUBIVENT Standard-Matratzenauflage** dient als Unterlage für Wechseldrucksysteme oder als Auflage für Matratzen. Sie ist geeignet für den Einsatz im Klinik- und Privatbereich als Ergänzung handelsüblicher Pflegebetten.

Grundsätzlich sollte der Einsatz der Matratzenauflage von geschultem Fachpersonal eingeschätzt werden.

INDIKATIONEN UND ZU ERWARTENDER KLINISCHER NUTZEN

Die **Standard-Matratzenauflage** verhindert das Aufliegen des Patienten auf dem Lattenrost, wenn beispielsweise bei einem medizinischen Notfall das Wechseldrucksystem durch die Pflegekraft schnellentlüftet wird. Außerdem schützt die **Standard-Matratzenauflage** den Anwender bei einem Druckverlust des Wechseldrucksystems vor dem Aufliegen auf dem Lattenrost wie auch das Einklemmen des Wechseldrucksystems in den Lattenrost.

Verwendet als Auflage auf Matratzen unterstützt die **Standard-Matratzenauflage** eine angenehme und weiche Lagerung des Anwenders. Der verwendete PU-Schaumstoff ermöglicht eine gute Anpassung an die Körperform und die jeweilige Liegeposition.

EINSATZ DER MATRATZE IN BETTEN MIT SEITENGITTERN

Beim Einsatz der **Standard-Matratzenauflage** ist der Mindestabstand von 22 cm zwischen Oberkante Matratze und Oberkante Seitengitter ist zu beachten. Empfehlenswert ist der Einsatz von sogenannten Seitengitterpolstern, um ein Einklemmen in den Seitengittern zu vermeiden.

ANWENDUNGSRISIKEN UND KONTRAINDIKATIONEN

Allergien
Die Auflagen dürfen nicht bei bestehenden Schaumstoffallergien eingesetzt werden.

Inkontinenz
Bei vorliegender Inkontinenz sollte ein passender Inkontinenzschutzbezug verwendet werden. Diese werden in allen passenden Größen als Zubehör angeboten.

Dekubitus
Für Dekubitus-Therapie und -Prophylaxe empfehlen wir den Einsatz unserer Anti-Dekubitus-Matratzen.


Gewichtsbeschränkungen
Bei zu schweren Patienten oder falscher Anwendung kann die Auflage durchgelegen werden. Die Auflage ist nicht als vollständige Matratze konzipiert. Die maximale Belastbarkeit ist abhängig vom Aufbau des verwendeten Pflegesystems (z. B. Pflegebett, Matratze, Wechseldrucksystem).

SACHGERECHTE ANWENDUNG

Beim Einsatz und Einlegen ins Bett sind keine besonderen Hinweise zu beachten. Die **Standard-Matratzenauflage** wird frei eingelegt.

TECHNISCHE DATEN

Querschnitt der **Standard-Matratzenauflagen** 4 cm

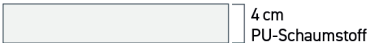

Schematische, technische Illustration eines Matratzen-Ausschnitts

Querschnitt der **Standard-Matratzenauflagen** 5 cm



Größen und Gewichte						
Größe	inkl. Trikotbezug		als schwer entzündbare Ausführung		ohne Bezug	
	Bestell-Nr.	Gewicht	Bestell-Nr.	Gewicht	Bestell-Nr.	Gewicht
190 x 90 x 4 cm	SMA42	2,6 kg	SMA42-SW	2,6 kg	SMA42-OB	2,3 kg
200 x 90 x 4 cm	SMA43	3,0 kg	SMA43-SW	3,0 kg	SMA43-OB	2,7 kg
200 x 100 x 4 cm	SMA44	3,3 kg	SMA44-SW	3,3 kg	SMA44-OB	3,0 kg
190 x 90 x 5 cm	SMA52	3,4 kg			SMA52-OB	3,1 kg
200 x 90 x 5 cm	SMA53	3,7 kg			SMA53-OB	3,4 kg
200 x 100 x 5 cm	SMA54	4,0 kg			SMA54-OB	3,7 kg

Verwendete Materialien für Kern und Bezüge		
	Standard Ausführung	als schwer entzündbare Ausführung
Kern	PU-Schaum Raumgewicht 35 kg/m³, Stauchhärte 4,2 kPa	PU-Schaum, schwer entzündbar, Raumgewicht 35 kg/m³, Stauchhärte 4,2 kPa
Bezüge	Trikotbezug	Trikotbezug, schwer entzündbar

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Die Reinigung und Desinfektion der Matratzenauflage erfolgt regelmäßig durch Abnehmen und Waschen bzw. Desinfizieren des Bezuges. Zu beachten sind die nachfolgenden Hinweise und das entsprechende Waschetikett am Bezug. Verwenden Sie handelsübliche Reinigungsmittel und auf Alkoholbasis hergestellte Desinfektionsmittel. Vor dem Wiedereinsatz der Matratze muss die Matratze/der Bezug vollständig trocknen.

Bei allen Reinigungs- und Desinfektionsverfahren dürfen kein Äthylenoxid, kein Formaldehyd und keine Phenole verwendet werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Mittel, die ätzende Substanzen, Säuren oder Bleiche enthalten sowie keine Mittel auf Basis von Chlor, Aceton oder Benzol.

Trikotbezug
Waschmaschine:

- waschmaschinengeeignet, waschbar bei 60°C,
- Desinfektion mit Desinfektionsvollwaschmittel möglich,
- wäschetrocknergeeignet bei niedriger Temperatur.

Wisch- und Flächendesinfektion:

- Das Desinfektionsmittel wird flächendeckend auf den Bezug aufgetragen. Gebrauchsfertige Desinfektionsmittel können mithilfe einer Sprühflasche auf die zu desinfizierende Fläche gebracht werden.

Ausführliche Informationen zur Reinigung und Desinfektion finden Sie unter www.kubivent.com.

WIEDEREINSATZ / PATIENTENWECHSEL

Der Wiedereinsatz der Matratze bei anderen Personen ist nicht vorgesehen.

SICHERE ENTSORGUNG

Die Matratze ist fachgerecht auf dem Sperrmüll oder einem Wertstoffhof zu entsorgen. Das Produkt hat keine physikalischen oder mikrobiologischen Gefahrenpotentiale, die bei der Entsorgung beachtet werden müssen.