



STANDARD-PFLEGEMATRATZEN

Gebrauchsanleitung KUBIVENT Standard Schwerlastmatratze

Zweischichtige PU-Schaummatratze



KUBIVENT 

EINSATZBEREICHE UND ZWECKBESTIMMUNG

Die **KUBIVENT Standard-Schwerlastmatratze** ist für den Einsatz bei adipösen Personen, die aufgrund von Krankheit oder Handicap, dauerhaft oder vorwiegend bettlägrig sind und ein Pflegebett benötigen. Sie ist geeignet für den Einsatz im Klinik- und Privatbereich als Ausstattung handelsüblicher Pflegebetten.

Grundsätzlich sollte der Einsatz der Matratze von geschultem Fachpersonal eingeschätzt werden.

INDIKATIONEN UND ZU ERWARTENDER KLINISCHER NUTZEN

Die verwendeten PU-Schaumstoffe mit verschiedenen Härtegraden ermöglichen eine gute Anpassung an die Körperform und die jeweilige Liegeposition. Dabei schaffen sie die notwendige Belastbarkeit bei schwergewichtigen Patienten.

VERWENDUNG DER MATRATZE IN BETTEN MIT VERSTELLBARER LIEGEFLÄCHE

Bei Personen, die aufgrund Ihrer Erkrankung/Behinderung häufig mit hochgestelltem Kopfteil im Bett sitzen, wird eine höhere Ausführung der Matratze empfohlen, damit ein Durchsitzen vermieden werden kann.

EINSATZ DER MATRATZE IN BETTEN MIT SEITENGITTERN

Aufgrund der Matratzenhöhe von 15, 18 bzw. 20 cm ist der Mindestabstand von 22 cm zwischen Oberkante Matratze und Oberkante Seitengitter zu beachten. Empfehlenswert ist der Einsatz von sogenannten Seitengitterpolstern, um ein Einklemmen in den Seitengittern zu vermeiden.

ANWENDUNGSRISEN UND KONTRAINDIKATIONEN

Allergien

Die Matratzen dürfen nicht bei bestehenden Schaumstoffallergien eingesetzt werden.

Inkontinenz

Bei vorliegender Inkontinenz sollte ein passender Inkontinenzschutzbezug verwendet werden. Diese werden in allen passenden Größen als Zubehör angeboten.

Dekubitus

Für Dekubitus-Therapie- und Prophylaxe empfehlen wir den Einsatz unserer Anti-Dekubitus-Matratzen.

Gewichtsbeschränkungen

Durch Überschreiten der angegebenen Gewichtsbeschränkungen der Matratze bei zu schweren Patienten kann die Matratze durchgelegen werden.

Höhe/Ausführung	15 cm	18 cm	20 cm
Einsatzbereich	0-160 kg	0-200 kg	0-250 kg

SACHGERECHTE ANWENDUNG


Die Matratze ist für den Einsatz im Pflegebett oder auch handelsüblichen Betten geeignet. Die Oberseite/Liegefläche der Matratze ist gekennzeichnet.

TECHNISCHE DATEN

Querschnitt der **Standard
Schwerlast-Matratze** 15 cm



Querschnitt der **Standard
Schwerlast-Matratze** 18 cm

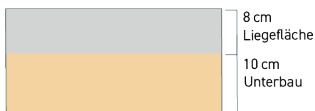

Querschnitt der **Standard
Schwerlast-Matratze** 20 cm



Schematische, technische Illustration eines Matratzen-Ausschnitts

Matratzengrößen und Gewichte						
Größe	In der Höhe 15 cm inkl. Trikotbezug		In der Höhe 18 cm inkl. Trevira CS-Bezug		In der Höhe 20 cm inkl. Trevira CS-Bezug	
	Bestell-Nr.	Gewicht	Bestell-Nr.	Gewicht	Bestell-Nr.	Gewicht
200 x 90 cm	SM153-50	14,3 kg	SM183-50	17,0 kg	SM203-50	19,0 kg
200 x 100 cm	SM154-50	15,9 kg	SM184-50	18,9 kg	SM204-50	21,1 kg
200 x 120 cm	SM155-50	19,1 kg	SM185-50	22,7 kg	SM205-50	25,3 kg
200 x 140 cm	SM156-50	22,3 kg	SM186-50	26,5 kg	SM206-50	29,5 kg
200 x 160 cm	SM157-50	25,5 kg	SM187-50	30,3 kg	SM207-50	33,7 kg

Verwendete Materialien für Matratzen und Bezüge

	15 cm Ausführung	18 cm Ausführung	20 cm Ausführung
Liegefläche	8 cm PU-Schaum, Raumgewicht 50 kg/m ³ , Stauchhärte 4,0 kPa		
Unterbau	7 cm PU-Schaum, Raumgewicht 50 kg/m ³ , Stauchhärte 6,0 kPa	10 cm PU-Schaum, Raumgewicht 50 kg/m ³ , Stauchhärte 6,0 kPa	12 cm PU-Schaum, Raumgewicht 50 kg/m ³ , Stauchhärte 6,0 kPa
Bezug	Trikotbezug		Trevira CS-Bezug
Schwer entzündbar nach DIN 597 1/2			

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Die Reinigung und Desinfektion der Matratze erfolgt regelmäßig durch Abnehmen und Waschen bzw. Desinfizieren des Bezuges. Zu beachten sind die nachfolgenden Hinweise und das entsprechende Waschetikett am Bezug. Verwenden Sie handelsübliche Reinigungsmittel und auf Alkoholbasis hergestellte Desinfektionsmittel. Vor dem Wiedereinsatz der Matratze muss die Matratze/der Bezug vollständig trocken sein.

Bei allen Reinigungs- und Desinfektionsverfahren dürfen kein Äthylenoxid, kein Formaldehyd und keine Phenole verwendet werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Mittel, die ätzende Substanzen, Säuren oder Bleiche enthalten sowie keine Mittel auf Basis von Chlor, Aceton oder Benzol.

Matratzenkern

- Der Matratzenkern ist für die Reinigung in der Waschmaschine nicht geeignet.
- Der Matratzenkern kann mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einem milden, haushaltsüblichen Reinigungs-/ Desinfektionsmittel abgewischt werden.

Trevira CS-Bezug

Waschmaschine:

- waschmaschinengeeignet,
- kochfest bis 95°C,
- Desinfektion mit Desinfektionsvollwaschmittel möglich,
- wäschetrocknergeeignet bei niedriger Temperatur.

Wisch- und Flächendesinfektion:

- Das Desinfektionsmittel wird flächendeckend auf den Bezug aufgetragen. Gebrauchsfertige Desinfektionsmittel können mithilfe einer Sprühflasche auf die zu desinfizierende Fläche gebracht werden.

Trikotbezug

Waschmaschine:

- waschmaschinengeeignet, waschbar bei 60° C,
- Desinfektion mit Desinfektionsvollwaschmittel möglich,
- wäschetrocknergeeignet bei niedriger Temperatur.

Wisch- und Flächendesinfektion:

- Das Desinfektionsmittel wird flächendeckend auf den Bezug aufgetragen. Gebrauchsfertige Desinfektionsmittel können mithilfe einer Sprühflasche auf die zu desinfizierende Fläche gebracht werden.

Ausführliche Informationen zur Reinigung und Desinfektion finden Sie unter www.kubivent.com.

WIEDEREINSATZ / PATIENTENWECHSEL

Der Wiedereinsatz der Matratze bei anderen Personen ist nicht vorgesehen.

SICHERE ENTSORGUNG

Die Matratze ist fachgerecht auf dem Sperrmüll oder einem Wertstoffhof zu entsorgen. Das Produkt hat keine physikalischen oder mikrobiologischen Gefahrenpotentiale, die bei der Entsorgung beachtet werden müssen.

LIEFERUMFANG

Standard Schwerlastmatratze 15cm inkl. Trikotbezug	Standard Schwerlastmatratze 18/20cm inkl. Trevira CS-Bezug
1x Standard Schwerlastmatratze (Matratzenkern)	1x Standard Schwerlastmatratze (Matratzenkern)
1x Trikotbezug (abnehmbar)	1x Trevira CS-Bezug (abnehmbar)
1x Gebrauchsanleitung	1x Gebrauchsanleitung
1x Kartonverpackung	1x Kartonverpackung

SICHERHEITSHINWEISE

Das Rauchen und Anwenden einer Flammquelle in unmittelbarer Nähe sollte vermieden werden.

**KONSULTATION EINES ANGEHÖRIGEN
DER GESUNDHEITSBERUFE, MELDEPFLICHT**

Wenn Ihnen die Anwendung des Produktes nicht geläufig sein sollte und Sie beim Einsatz Hilfestellung benötigen, steht Ihnen unser Fachpersonal für Rückfragen gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Bei allergischen Reaktionen auf der Haut konsultieren Sie einen Arzt. Bitte beachten Sie, dass alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden sind. Schwerwiegende Vorfälle im Sinne des Gesetzes sind alle unerwünschten Ereignisse, die eine der nachstehenden Folgen hatten: Tod, lebensbedrohliche Erkrankung oder Verletzung, bleibende Körperschäden, chronische Erkrankungen oder fötale Gefährdung.

WARTUNG DURCH DEN ANWENDER

Grundsätzlich muss keine Wartung durch den Anwender durchgeführt werden.

HERSTELLUNG UND VERTRIEB

KUBIVENT Standard Schwerlastmatratzen werden ausschließlich von der Firma KUBIVENT Sitz- und Liegepolster GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben.

Die Matratzen sind Medizinprodukte der Klasse I und als solche CE-gekennzeichnet.