



**STANDARD-PROPHYLAXE-MATRATZEN**

# Gebrauchsanleitung **KUBIVENT Compact DuoCare**

PU- und Kaltschaummatratze mit Längseinschnitten

Änderungen vorbehalten - Stand 01/2022 - AGB siehe [www.kubivent.com](http://www.kubivent.com)



Made  
in  
Germany

**KUBIVENT**   
*sitzen · liegen · positionieren*

## EINSATZBEREICHE UND ZWECKBESTIMMUNG

Die **KUBIVENT Compact DuoCare** unterstützt bei entsprechenden pflegerischen Maßnahmen die Dekubitusprophylaxe bei Personen die aufgrund von Krankheit oder Handicap dauerhaft oder überwiegend bettlägrig sind und ein Pflegebett benötigen. Die Matratze ist aufgebaut nach den Spezifikationen der jeweiligen Krankenkassen und dadurch geeignet für den Einsatz im Klinik- und Privatbereich als Ausstattung handelsüblicher Pflegebetten.

**Grundsätzlich sollte der Einsatz der Matratze von geschultem Fachpersonal eingeschätzt werden.**

## INDIKATIONEN UND ZU ERWARTENDER KLINISCHER NUTZEN

Die Matratze unterstützt eine angenehme und weiche Lagerung des Anwenders. Der verwendete Kaltschaumstoff ermöglicht eine gute Anpassung an die Körperform und die jeweilige Liegeposition. Dies bildet die Grundlage für eine gute Druckverteilung. In Kombination mit den Längseinschnitten werden gleichzeitig Scherkräfte, wie sie z. B. bei Pflegemaßnahmen auftreten, reduziert. Außerdem ermöglichen die Einschnitte in der Liegefläche eine gute Belüftung und beugen damit dem Wärme- und Feuchtigkeitsstau vor.

## VERWENDUNG DER MATRATZE IN BETTEN MIT VERSTELLBARER LIEGEFLÄCHE

Bei Personen, die aufgrund Ihrer Erkrankung/Behinderung häufig mit hochgestelltem Kopfteil im Bett sitzen, wird eine härtere Matratze empfohlen, damit auch beim Sitzen eine gute Druckverteilung und Druckentlastung im Sakralbereich gewährleistet und ein Durchsitzen vermieden werden kann.

## EINSATZ DER MATRATZE IN BETTEN MIT SEITENGITTERN

Aufgrund der Matratzenhöhe von 12 cm sind beim Einsatz der handelsüblichen Seitengitter keine Einschränkungen vorhanden. Der Mindestabstand von 22 cm zwischen Oberkante Matratze und Oberkante Seitengitter ist zu beachten. Empfehlenswert ist der Einsatz von sogenannten Seitengitterpolstern, um ein Einklemmen in den Seitengittern zu vermeiden.

## ANWENDUNGSRISIKEN UND KONTRAINDIKATIONEN

### Allergien

Die Matratzen dürfen nicht bei bestehenden Schaumstoffallergien eingesetzt werden.

### Inkontinenz

Bei vorliegender Inkontinenz sollte ein passender Inkontinenzschutzbezug verwendet werden. Diese werden in allen passenden Größen als Zubehör angeboten.

### Dekubitus

Für Dekubitus-Therapie und-Prophylaxe empfehlen wir den Einsatz unserer Anti-Dekubitus-Matratzen.

### Gewichtsbeschränkungen

Durch Überschreiten der angegebenen Gewichtsbeschränkungen der Matratze bei zu schweren Patienten kann die Matratze durchgelegen werden.


|                 |          |
|-----------------|----------|
| Höhe/Ausführung | 12 cm    |
| Einsatzbereich  | 0-120 kg |

## SACHGERECHTE ANWENDUNG

Die Matratze ist für den Einsatz im Pflegebett oder auch handelsüblichen Betten geeignet. Die Oberseite/Liegefläche der Matratze ist gekennzeichnet, sodass die Längseinschnitte nach oben gerichtet sind.

## TECHNISCHE DATEN

Querschnitt der **Compact DuoCare** 12 cm

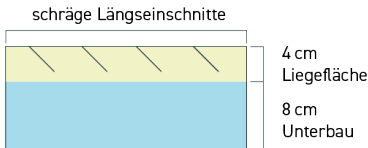

Schematische, technische Illustration eines Matratzen-Ausschnitts

| Matratzengrößen und Gewichte |                |  |                                       | Verwendete Materialien für Matratzen und Bezüge |   |
|------------------------------|----------------|--|---------------------------------------|---|---|
| <b>Höhe 12 cm</b>            |                | inkl. schwer entzündbarem Polyesterbezug | inkl. schwer entzündbarem Trikotbezug | Liegefläche                                     | Kaltschaum:<br>Raumgewicht 40 kg/m <sup>3</sup> , Stauchhärte 3,0 kPa |
| <b>Größe</b>                 | <b>Gewicht</b> | <b>Bestell-Nr.</b>                       | <b>Bestell-Nr.</b>                    | Unterbau  | PU-Schaum:<br>Raumgewicht 35 kg/m <sup>3</sup> , Stauchhärte 4,2 kPa  |
| 190 x 90 x 12 cm             | 7,3 kg         | WM102-BWSW2SC                            | WM102-BWSW2                           | Bezüge  | Trikotbezug, Polyesterbezug   |
| 200 x 90 x 12 cm             | 7,8 kg         | WM103-BWSW2SC                            | WM103-BWSW2                           | Schwer entzündbar nach DIN 597 1/2              |   |
| 200 x 100 x 12 cm            | 8,5 kg         | WM104-BWSW2SC                            | WM104-BWSW2                           |   |   |

## REINIGUNG UND DESINFEKTION

Die Reinigung und Desinfektion der Matratze erfolgt regelmäßig durch Abnehmen und Waschen bzw. Desinfizieren des Bezuges. Zu beachten sind die nachfolgenden Hinweise und das entsprechende Waschetikett am Bezug. Verwenden Sie handelsübliche Reinigungsmittel und auf Alkoholbasis hergestellte Desinfektionsmittel. Vor dem Wiedereinsatz der Matratze muss die Matratze/der Bezug vollständig trocknen. Bei allen Reinigungs- und Desinfektionsverfahren dürfen kein Äthylenoxid, kein Formaldehyd und keine Phenole verwendet werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Mittel, die ätzende Substanzen, Säuren oder Bleiche enthalten sowie keine Mittel auf Basis von Chlor, Aceton oder Benzol.

### Matratzenkern

- Der Matratzenkern ist für die Reinigung in der Waschmaschine nicht geeignet.
- Der Matratzenkern kann mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einem milden, haushaltsüblichen Reinigungs-/ Desinfektionsmittel abgewischt werden.

### Bezüge

Waschmaschine:

- waschmaschinengeeignet bis 60°C,
- Desinfektion mit Desinfektionsvollwaschmittel möglich,
- wäschetrocknergeeignet bei niedriger Temperatur.

Wisch- und Flächendesinfektion:

- Das Desinfektionsmittel wird flächendeckend auf den Bezug aufgetragen. Gebrauchsfertige Desinfektionsmittel können mithilfe einer Sprühflasche auf die zu desinfizierende Fläche gebracht werden.

Ausführliche Informationen zur Reinigung und Desinfektion finden Sie unter [www.kubivent.com](http://www.kubivent.com).

## WIEDEREINSATZ / PATIENTENWECHSEL

Der Wiedereinsatz der Matratze bei anderen Personen ist nicht vorgesehen.

## SICHERE ENTSORGUNG

Die Matratze ist fachgerecht auf dem Sperrmüll oder einem Wertstoffhof zu entsorgen. Das Produkt hat keine physikalischen oder mikrobiologischen Gefahrenpotentiale, die bei der Entsorgung beachtet werden müssen.

## LIEFERUMFANG

| Compact DuoCare<br>Matratze inkl. Trikotbezug      | Compact DuoCare<br>Matratze inkl. Polyesterbezug   |
|--|--|
| 1x <b>Compact DuoCare</b> ( <i>Matratzenkern</i> ) | 1x <b>Compact DuoCare</b> ( <i>Matratzenkern</i> ) |
| 1x Trikotbezug ( <i>abnehmbar</i> )                | 1x Polyesterbezug ( <i>abnehmbar</i> )             |
| 1x Gebrauchsanleitung                              | 1x Gebrauchsanleitung                              |
| 1x Folienverpackung                                | 1x Folienverpackung                                |

## SICHERHEITSHINWEISE

Das Rauchen und Anwenden einer Flammsquelle in unmittelbarer Nähe sollte vermieden werden.

KONSULTATION EINES ANGEHÖRIGEN  
DER GESUNDHEITSBERUFE, MELDEPFLICHT

Wenn Ihnen die Anwendung des Produktes nicht geläufig sein sollte und Sie beim Einsatz Hilfestellung benötigen, steht Ihnen unser Fachpersonal für Rückfragen gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne.

Bei allergischen Reaktionen auf der Haut konsultieren Sie einen Arzt. Bitte beachten Sie, dass alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden sind. Schwerwiegende Vorfälle im Sinne des Gesetzes sind alle unerwünschten Ereignisse, die eine der nachstehenden Folgen hatten: Tod, lebensbedrohliche Erkrankung oder Verletzung, bleibende Körperschäden, chronische Erkrankungen oder fötale Gefährdung.

## WARTUNG DURCH DEN ANWENDER

Grundsätzlich muss keine Wartung durch den Anwender durchgeführt werden.

## HERSTELLUNG UND VERTRIEB



**KUBIVENT Compact DuoCare** Matratzen werden ausschließlich von der Firma **KUBIVENT** Sitz- und Liegepolster GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben.

Die Matratzen sind Medizinprodukte der Klasse I und als solche CE-gekennzeichnet.