



Sturzmatten

Gebrauchsanleitung KUBIVENT Sturzmatten

Änderungen vorbehalten - Stand 10/2021 - AGB siehe www.kubivent.com



KUBIVENT 
sitzen · liegen · positionieren

EINSATZBEREICHE UND ZWECKBESTIMMUNG

Die **KUBIVENT Sturzmatten** sind für den Einsatz vor handelsüblichen Betten und Pflegebetten im Klinik- und Privatbereich zur Verletzungsprävention bei Personen,

- mit neurologischen Störungen oder Demenz, die sich unkontrolliert bewegen und aus dem Bett fallen,
- mit Gang- und Gleichgewichtsstörungen,
- mit Osteoporose und
- die Sturzgefährdet sind.

Grundsätzlich sollte der Einsatz der Sturzmatten von geschultem Fachpersonal eingeschätzt werden.

INDIKATIONEN UND ZU ERWARTENDER KLINISCHER NUTZEN

Die Sturzmatten können die Sturzgefahr nicht verhindern, reduzieren jedoch das Verletzungsrisiko beim Sturz.

ANWENDUNGSRISIKEN UND KONTRAINDIKATIONEN

Sturzgefahr


Die Sturzmatten sollten nur dann eingesetzt werden, wenn die zu pflegende Person im Bett liegt. Nach dem Verlassen des Bettes sollte die Sturzmatte entfernt werden, da durch die Höhe von 5cm bzw. 20cm (*SafeGuard*) eine Stolpergefahr besteht.

SACHGERECHTE ANWENDUNG

Die Sturzmatten werden so vor dem Bett platziert, dass die lange Seite bzw. der Keil zur Bettseite ausgerichtet ist. Die Varianten Flach, Keil und 3-Teilig werden mit dem schwarzen **AntiSlip**-Material nach unten ausgerichtet. Bei Höhenverstellbaren Betten empfehlen wir die Höhe zu reduzieren, um die Sturzhöhe zu minimieren.

TECHNISCHE DATEN

Querschnitt **SafeGuard**

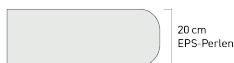

Querschnitt **Sturzmatte „Standard“**



Querschnitt **Sturzmatte „Keilform“**



Querschnitt **Sturzmatte „Faltbar“**



Schematische, technische Illustration eines Sturzmatten-Ausschnitts

Mattengrößen und Gewichte				
inkl. wasserabweisendem Bezug, lila		inkl. wasserabweisendem Bezug, rot		
Variante	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Gewicht	Größe Breite x Tiefe
SafeGuard	STUMA-SGLI	STUMA-SG	6,0 kg	160 x 120 x 20 cm
inkl. Inkontinenzschutzbezug mit AntiSlip, lila		inkl. Inkontinenzschutzbezug mit AntiSlip, blau		
Standard	STUMA-ILI	STUMA	4,0 kg	190 x 90 x 5 cm
Keilform	STUMAK-ILI	STUMAK	4,9 kg	190 x 90 x 25-5 cm
Faltbar	STUMA3T-ILI	STUMA3T	2,9 kg	185 x 60 x 5 cm

Verwendete Materialien für Sturzmatten und Bezüge		
	SafeGuard	Sturzmatten
Füllung	EPS-Perlen	PU-Schaum Raumgewicht 35 kg/m ³ 4,2 kPa
Bezug	Wasserabweisender PVC-beschichteter Polyesterbezug	Polyurethanbeschichtetes Polyestergewebe

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Die Reinigung und Desinfektion der Sturzmatte erfolgt regelmäßig durch Abnehmen und Waschen bzw. Desinfizieren des Bezuges. Zu beachten sind die nachfolgenden Hinweise und das entsprechende Waschetikett am Bezug. Verwenden Sie handelsübliche Reinigungsmittel und auf Alkoholbasis hergestellte Desinfektionsmittel. Vor dem Wiedereinsatz der Sturzmatte muss die Sturzmatte/der Bezug vollständig trocknen. Bei allen Reinigungs- und Desinfektionsverfahren dürfen kein Äthylenoxid, kein Formaldehyd und keine Phenole verwendet werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Mittel, die ätzende Substanzen, Säuren oder Bleiche enthalten sowie keine Mittel auf Basis von Chlor, Aceton oder Benzol.

Sturzmattenkern

- Die Sturzmattenkerne sind für die Reinigung in der Waschmaschine nicht geeignet.
- Der Sturzmattenkern (*ausgenommen SafeGuard*) kann mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einem milden, haushaltsüblichen Reinigungs-/Desinfektionsmittel abgewischt werden.

Inkontinenzschutzbezug

Waschmaschine:

- Waschmaschinengeeignet bis 95°C.
- Desinfektion mit Desinfektionsvollwaschmittel möglich.
- Wäschetrocknergeeignet bei niedriger Temperatur.

Wisch- und Flächendesinfektion:

- Das Desinfektionsmittel wird flächendeckend auf den Bezug aufgetragen. Gebrauchsfertige Desinfektionsmittel können mithilfe einer Sprühflasche auf die zu desinfizierende Fläche gebracht werden.

Wasserabweisender PVC-beschichteter Polyesterbezug

Waschmaschine:

- Waschmaschinengeeignet bis 40°C.
- Desinfektion mit Desinfektionsvollwaschmittel möglich.
- Wäschetrocknergeeignet bei niedriger Temperatur.

Wisch- und Flächendesinfektion:

- Das Desinfektionsmittel wird flächendeckend auf den Bezug aufgetragen. Gebrauchsfertige Desinfektionsmittel können mithilfe einer Sprühflasche auf die zu desinfizierende Fläche gebracht werden.

Ausführliche Informationen zur Reinigung und Desinfektion finden Sie unter www.kubivent.com.

WIEDEREINSATZ / PATIENTENWECHSEL

Der Wiedereinsatz der Sturzmatten bei anderen Personen ist nicht vorgesehen.

SICHERE ENTSORGUNG

Die Sturzmatte ist fachgerecht auf dem Sperrmüll oder einem Wertstoffhof zu entsorgen. Das Produkt hat keine physikalischen oder mikrobiologischen Gefahrenpotentiale, die bei der Entsorgung beachtet werden müssen.

SICHERHEITSHINWEIS

Das Rauchen und Anwenden einer Flammquelle in unmittelbarer Nähe sollte vermieden werden.

LIEFERUMFANG

SafeGuard inkl. Wasserabweisendem Polyesterbezug	Sturzmatte inkl. Inkontinenzschutzbezug mit AntiSlip
1x SafeGuard (<i>Kern</i>)	1x Sturzmatte (<i>Kern</i>)
1x Wasserabweisender Polyesterbezug (<i>abnehmbar</i>)	1x Inkontinenzschutzbezug (<i>abnehmbar</i>)
1x Gebrauchsanleitung	1x Gebrauchsanleitung
1x Kartonverpackung	1x Folienverpackung

**KONSULTATION EINES ANGEHÖRIGEN
DER GESUNDHEITSBERUFE, MELDEPFLICHT**

Wenn Ihnen die Anwendung des Produktes nicht geläufig sein sollte und Sie beim Einsatz Hilfestellung benötigen, steht Ihnen unser Fachpersonal für Rückfragen gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Bei allergischen Reaktionen auf der Haut konsultieren Sie einen Arzt. Bitte beachten Sie, dass alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden sind. Schwerwiegende Vorfälle im Sinne des Gesetzes sind alle unerwünschten Ereignisse, die eine der nachstehenden Folgen hatten: Tod, lebensbedrohliche Erkrankung oder Verletzung, bleibende Körperschäden, chronische Erkrankungen oder fötale Gefährdung.

WARTUNG DURCH DEN ANWENDER

Grundsätzlich muss keine Wartung durch den Anwender durchgeführt werden.

HERSTELLUNG UND VERTRIEB

KUBIVENT Sturzmatten werden ausschließlich von der Firma **KUBIVENT** Sitz- und Liegepolster GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben.

Die Sturzmatte sind Medizinprodukte der Klasse I und als solche CE-gekennzeichnet.