



SONDERLÖSUNGEN

# Gebrauchsanleitung KUBIVENT FRAME

Änderungen vorbehalten - Stand 08/2022 - AGB siehe [www.kubivent.com](http://www.kubivent.com)



Made  
in  
Germany

**KUBIVENT**   
*sitzen · liegen · positionieren*

## EINSATZBEREICHE, ZWECKBESTIMMUNG UND INDIKATIONEN

Der **KUBIVENT Frame** dient als Unterlage für Wechseldrucksysteme für den Einsatz in handelsüblichen Betten und Pflegebetten. Der Frame unterstützt und stabilisiert das Wechseldrucksystem in seiner vorgesehenen Funktion und schützt die Wechseldruckmatratze vor dem Einklemmen im Bett/Pflegebett oder Beschädigungen durch das Bett/Pflegebett. Der Frame wird in Kombination mit einer Wechseldruckmatratze bei Personen eingesetzt, die aufgrund von Krankheit oder Handicap, dauerhaft oder vorwiegend bettlägerig sind.

Grundsätzlich sollte der Einsatz des Zubehörs von geschultem Fachpersonal eingeschätzt werden

## ANWENDUNGSRISIKEN UND KONTRAINDIKATIONEN

### Allergien

Der Frame darf nicht bei bestehenden Schaumstoffallergien eingesetzt werden.

### Inkontinenz

Der Frame ist standardmäßig mit einem Inkontinenzschutzbezug ausgestattet.


### Allgemein

Der Frame ist nicht als eigenständige Auflage oder Matratze konzipiert und dient als Zubehör zu einer Wechseldruckmatratze.

## SACHGERECHTE ANWENDUNG

Der Frame ist für den Einsatz im Pflegebett oder auch handelsüblichen Betten geeignet. Der Frame wird so ins Bett eingelegt, dass der offene Rahmen (*Frame*) nach oben zeigt. Die Seitenteile liegen dabei längs zum Bettgestell. In den Frame wird das Wechseldrucksystem eingelegt.

## TECHNISCHE DATEN

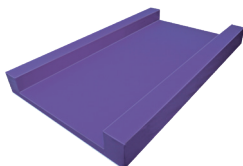

Größen und Gewichte		
Artikel-Nr.	Größe in cm	Grundplattenhöhe
Sonder-Frame	-	5 cm

Verwendete Materialien für Kern und Bezug	
	Frame
Kern	PU-Schaumstoff Raumgewicht 35 kg/m <sup>3</sup> , Stauchhärte 4,2 kPa
Inkontinenzschutzbezug	PU-beschichtetes Polyestergewebe

## REINIGUNG UND DESINFEKTION

Die Reinigung und Desinfektion des Frames erfolgt regelmäßig durch Abnehmen und Waschen bzw. Desinfizieren des Bezuges. Zu beachten sind die nachfolgenden Hinweise und das entsprechende Waschetikett am Bezug. Verwenden Sie handelsübliche Reinigungsmittel und auf Alkoholbasis hergestellte Desinfektionsmittel. Vor dem Wiedereinsatz des Frames muss der Frame/der Bezug vollständig trocknen. Bei allen Reinigungs- und Desinfektionsverfahren dürfen kein Äthylenoxid, kein Formaldehyd und keine Phenole verwendet werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Mittel, die ätzende Substanzen, Säuren oder Bleiche enthalten sowie keine Mittel auf Basis von Chlor, Aceton oder Benzol.

**Kern**

- Der Kern des Frames ist für die Reinigung in der Waschmaschine nicht geeignet.
- Der Kern kann mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einem milden, haushaltsüblichen Reinigungs-/Desinfektionsmittel abgewischt werden.

**Inkontinenzschutzbezug**

Waschmaschine:

- Waschmaschinengeeignet,
- kochfest bis 95°C,
- Desinfektion mit Desinfektionsvollwaschmittel möglich,
- Wäschetrocknergeeignet bei niedriger Temperatur.

Wisch- und Flächendesinfektion:

- Das Desinfektionsmittel wird flächendeckend auf den Bezug aufgetragen. Gebrauchsfertige Desinfektionsmittel können mithilfe einer Sprühflasche auf die zu desinfizierende Fläche gebracht werden.

**WIEDEREINSATZ / PATIENTENWECHSEL**

Ein Wiedereinsatz des Frames ist grundsätzlich möglich. Voraussetzung hierfür ist eine sach- und fachgerechte Reinigung und Desinfektion (*hygienische Aufbereitung nach dem vom RKI gelisteten VDV-Verfahren*) des Frames und des Bezuges. Eine entsprechende Wiedereinsatzreinigung entsprechend den Anforderungen des MPG wird von uns derzeit nicht angeboten.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter:

Tel.: +49 (0) 7181-475 060 oder per E-Mail an [info@kubivent.com](mailto:info@kubivent.com).

**SICHERE ENTSORGUNG**

Der Frame ist fachgerecht auf dem Sperrmüll oder einem Wertstoffhof zu entsorgen. Das Produkt hat keine physikalischen oder mikrobiologischen Gefahrenpotentiale, die bei der Entsorgung beachtet werden müssen.

**SICHERHEITSHINWEIS**

Das Rauchen und Anwenden einer Flammquelle in unmittelbarer Nähe sollte vermieden werden..

**LIEFERUMFANG**

Frame
1x <b>Frame (Kern)</b>
1x Inkontinenzschutzbezug ( <i>abnehmbar</i> )
1x Gebrauchsanleitung
1x Folienverpackung

**KONSULTATION EINES ANGEHÖRIGEN  
DER GESUNDHEITSBERUFE, MELDEPFLICHT**

Wenn Ihnen die Anwendung des Produktes nicht geläufig ist und Sie beim Einsatz Hilfestellung benötigen, steht Ihnen unser Fachpersonal gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne. Bei allergischen Reaktionen auf der Haut konsultieren Sie einen Arzt. Bitte beachten Sie, dass alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden sind.

Schwerwiegende Vorfälle im Sinne des Gesetzes sind alle unerwünschten Ereignisse, die eine der nachstehenden Folgen haben: Tod, lebensbedrohliche Erkrankung oder Verletzung, bleibende Körperschäden, chronische Erkrankungen oder fötale Gefährdung.

## **WARTUNG DURCH DEN ANWENDER**

Grundsätzlich muss keine Wartung durch den Anwender durchgeführt werden.

## **HERSTELLUNG UND VERTRIEB**



Der **KUBIVENT Frame** wird ausschließlich von der Firma **KUBIVENT** Sitz- und Liegepolster GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben.

Der Frame ist ein Medizinprodukt der Klasse I und als solches CE-gekennzeichnet.