



ZUBEHÖR

Gebrauchsanleitung KUBIVENT Seitengitterpolster

Änderungen vorbehalten - Stand 08/2023 - AGB siehe www.kubivent.com



Made
in
Germany

KUBIVENT 
sitzen · liegen · positionieren

EINSATZBEREICHE UND ZWECKBESTIMMUNG

Das **KUBIVENT-Seitengitterpolster** ist für den Einsatz in handelsüblichen Betten und Pflegebetten im Klinik- und Privatbereich zur Verletzungsprävention,

- bei Personen, die sich unkontrolliert bewegen und
- bei denen ein Einklemmen von Extremitäten in Seitengittern verhindert werden soll.

Grundsätzlich sollte der Einsatz der Seitengitterpolster von geschultem Fachpersonal eingeschätzt werden.

INDIKATIONEN UND ERWARTENDER KLINISCHER NUTZEN

Die Seitengitterpolster reduzieren die Verletzungsgefahr durch Anstoßen oder Einklemmen am Seitengitter.

ANWENDUNGSRISIKEN UND KONTRAINDIKATIONEN


Allergien

Die Seitengitterpolster dürfen nicht bei bestehenden Schaumstoffallergien eingesetzt werden.


SACHGERECHTE ANWENDUNG

Die Seitengitterpolster sind für den Einsatz im Pflegebett oder auch handelsüblichen Betten geeignet. Die Seitengitterpolster werden mit dem Klettverschluss am Seitengitter des Bettgestells befestigt.

Anbringung des doppelwandigen Polsters an ein Seitengitter

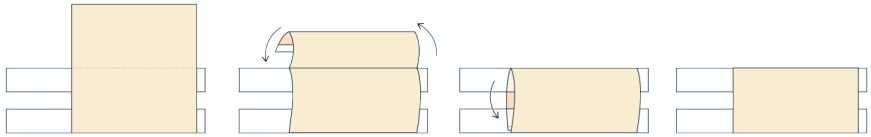

Anbringung des einwandigen Polsters an ein Seitengitter

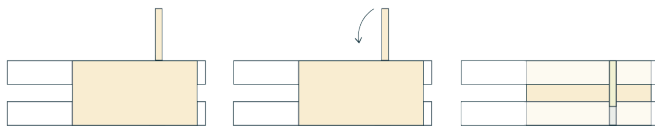

Schematische, technische Illustration eines Pflegebett-Seitengitters mit Seitengitterpolster

TECHNISCHE DATEN

Größen und Gewichte					
Seitengitterpolster einwandig			Seitengitterpolster doppelwandig		
Größe	Gewicht	Artikel-Nr.	Größe	Gewicht	Artikel-Nr.
190x40x4cm	1,0 kg	SGP-102	170x65x1 cm	0,6 kg	SGP-B1
			190x76x1 cm	0,7 kg	SGP-B2
			93x76x1	0,4 kg	SGP-B3

Verwendete Materialien für Seitengitterpolster und Bezüge	
	Seitengitterpolster einwandig und doppelwandig
Innenfutter	PU-Schaumstoff, Raumgewicht 35 kg/m ³ , Stauchhärte 4,2 kPa
Bezug	Kunstlederbezug

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Die Reinigung und Desinfektion des Zubehörs erfolgt regelmäßig durch Reinigen bzw. Desinfizieren des Bezuges. Zu beachten sind die nachfolgenden Hinweise. Verwenden Sie handelsübliche Reinigungsmittel und auf Alkoholbasis hergestellte Desinfektionsmittel. Vor dem Wiedereinsatz des Zubehörs muss der Bezug vollständig trocknen. Bei allen Reinigungs- und Desinfektionsverfahren dürfen kein Äthylenoxid, kein Formaldehyd und keine Phenole verwendet werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Mittel, die ätzende Substanzen, Säuren oder Bleiche enthalten sowie keine Mittel auf Basis von Chlor, Aceton oder Benzol.

Waschmaschine

- Das Seitengitterpolster ist für die Reinigung in der Waschmaschine nicht geeignet.

Wisch- und Flächendesinfektion

- Das Desinfektionsmittel wird flächendeckend auf den Bezug aufgetragen. Gebrauchsfertige Desinfektionsmittel können mit Hilfe einer Sprühflasche auf die zu desinfizierende Fläche gebracht werden.

Ausführliche Informationen zur Reinigung und Desinfektion finden Sie unter www.kubivent.com.

WIEDEREINSATZ / PATIENTENWECHSEL

Der Wiedereinsatz des Seitengitterpolsters bei anderen Personen ist nicht vorgesehen.

SICHERE ENTSORGUNG

Das Zubehör ist fachgerecht auf dem Sperrmüll oder einem Wertstoffhof zu entsorgen. Das Produkt hat keine physikalischen oder mikrobiologischen Gefahrenpotentiale, die bei der Entsorgung beachtet werden müssen.

LIEFERUMFANG

Seitengitterpolster einwandig oder doppelwandig
1x Seitengitterpolster
1x Gebrauchsanleitung
1x Folienverpackung

SICHERHEITSHINWEISE

Das Rauchen und Anwenden einer Flamquelle in unmittelbarer Nähe sollte vermieden werden.

KONSULTATION EINES ANGEHÖRIGEN DER GESUNDHEITSBERUFE, MELDEPFLICHT

Wenn Ihnen die Anwendung des Produktes nicht geläufig sein sollte und Sie beim Einsatz Hilfestellung benötigen, steht Ihnen unser Fachpersonal für Rückfragen gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Bei allergischen Reaktionen auf der Haut konsultieren Sie einen Arzt. Bitte beachten Sie, dass alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden sind. Schwerwiegende Vorfälle im Sinne des Gesetzes sind alle unerwünschten Ereignisse, die eine der nachstehenden Folgen hatten: Tod, lebensbedrohliche Erkrankung oder Verletzung, bleibende Körperschäden, chronische Erkrankungen oder fötale Gefährdung.

WARTUNG DURCH DEN ANWENDER

Grundsätzlich muss keine Wartung durch den Anwender durchgeführt werden.

HERSTELLUNG UND VERTRIEB



KUBIVENT Seitengitterpolster werden ausschließlich von der Firma **KUBIVENT** Sitz- und Liegepolster GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben.

Die Polster sind Medizinprodukte der Klasse I und als solche CE-gekezeichnet.