

POSITIONIERUNGSHILFEN

Gebrauchsanleitung KUBIVENT PurplePos

Therapie und
Prophylaxe

Nach Braden Skala
allgemein



EINSATZBEREICHE UND ZWECKBESTIMMUNG

Die **KUBIVENT Positionierungshilfen** unterstützen bei entsprechenden pflegerischen Maßnahmen die Prophylaxe und Therapie bei Personen,

- mit bereits bestehenden Dekubitus und
- bei Personen, die durch dauerhaftes Liegen aufgrund von Krankheit oder Behinderung eine Dekubitus-Risiko haben.

Die Positionierungshilfen können zur Umpositionierung, Entlastung und Freilagerung angewendet werden.

Die Körperwahrnehmung und das Wohlbefinden werden dabei positiv unterstützt. Die individuell einsetzbaren Hilfsmittel können für die im pflegerischen Bereich üblichen Positionsunterstützungsarten eingesetzt werden, beispielsweise für:

- Mikropositionierung,
- 30°-Seitenpositionierung,
- 130°-Seitenpositionierung,
- Bobath-Positionierung,
- Nestchen-Positionierung,
- Positionierung des Kopfes,
- Positionierung von Extremitäten,
- Langsitz und
- sonstige pflegerisch indizierte Positionierungsunterstützungen.

Grundsätzlich sollte der Einsatz der Positionierungshilfen von geschultem Fachpersonal eingeschätzt werden.

INDIKATIONEN UND ZU ERWARTENDER KLINISCHER NUTZEN

Die Positionierungshilfen dienen bei Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition mit erheblich ausgeprägter Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/Druckgeschwür am Körperstamm/Rücken/Extremitäten (*durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung*) und/oder drohender und manifester Druckschädigung der Haut und Unterhaut (*Dekubitus/Druckgeschwür*) am Körperstamm/Rücken/Extremitäten, wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist, zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses.¹

VERWENDUNG DES PRODUKTES IN BETTEN MIT VERSTELLBARER LIEGEFLÄCHE

Die **KUBIVENT PurplePos** Positionierungshilfen sind uneingeschränkt in Betten mit verstellbarer Liegefläche einsetzbar. Es ist darauf zu achten, dass die Kissen nicht die Atemwege blockieren. In Betten mit Seitengittern muss die Positionierung so erfolgen, dass Verletzungen oder dem Herausfallen der Person durch korrekte Positionierung entgegen gewirkt wird.

ANWENDUNGSRISIKEN UND KONTRAINDIKATIONEN

Personen die stark schwitzen, sollten direkten Hautkontakt mit dem Inkontinenzschutzbezug, vermeiden. Der im Lieferumfang enthaltene Baumwollbezug wirkt dem Entgegen und vermeidet Feuchtigkeitsstau.

SACHGERECHTE ANWENDUNG

Ausführliche Informationen zur Anwendung der KUBIVENT Positionierungshilfen finden Sie in den KUBIVENT PurplePos Produktvideos auf Youtube.

Kissen VariMed

Durch die längliche Ausführung lassen sich die Kissen in verschiedene individuelle Formen bringen. Die Füllung kann zusätzlich bequem und einfach durch kreisende Handbewegung verteilt werden.

Durch die feinen Mikroperlen im Inneren lässt sich die gewünschte Form stabilisieren. Je nach Bedarf kann das Kissen für die individuelle Positionsunterstützung angewandt werden.




Kissen PhysiForm

Quadratische bzw. rechteckige Universalkissen. Je nach Bedarf für die individuelle Positionsunterstützung anzuwenden. Das Kissen in der Größe 70 x 50 cm gibt es zusätzlich in einer speziellen Ausführung. Mit seiner stärkeren Füllung eignet es sich vorrangig für die Lagerung des Kopfes, um eine Überdehnung des Nackens zu vermeiden. Optisches Unterscheidungsmerkmal: Weißer Bezug.



Halbrolle

Optimal für die Fernsenerfreilagerung und zur individuellen Positions-Unterstützung der Beine. Durch die spezielle Schaumstoff-Kombination aus Kalt- und PU-Schaum wird eine angenehme Position mit der nötigen Stützkraft geschaffen.

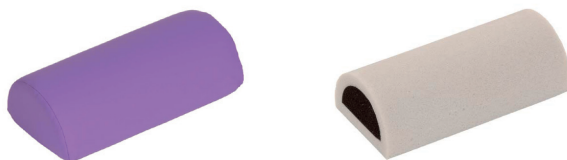


Keil

Geeignet zur Mikrolagerung. Der etwas stabilere Schaumstoff-Innenkern wurde an jeder Seite mit einem weicheren Kalt-schaum ummantelt. Dadurch ist der Keil flexibel einsetzbar.



Keilkissen XS

Empfiehlt sich zur zeitlich begrenzten Unterstützung von Bewegungsaktivitäten. Zur Druckentlastung oder Freilagerung an schwer zugänglichen Bereichen der Beine, z.B. bei Kontrakturen.

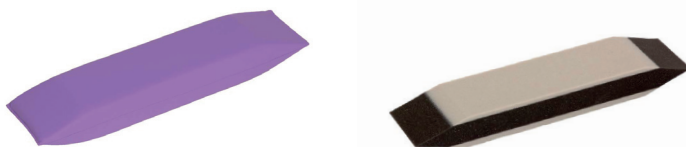

Handkissen

Durch die Mikroperlen-Füllung individuell modellierbar. Eignet sich optimal für die Positionierung der leicht geöffneten Hand. Der abnehmbare Hygiene-Bezug sorgt für den Abtransport von Schweiß, ist bei 60°C waschbar und schnell wieder einsetzbar.



TECHNISCHE DATEN

Größen und Gewichte					
Produkt	Größe in cm	Gewicht in g	Hilfsmittel-Nr.	PZN	Artikel-Nr.
VariMed	140 x 35	1050	11.11.05.2006	-	PKVM140
VariMed	180 x 35	1500	11.11.05.2006	12548312	PKVM180
VariMed	220 x 35	1850	11.11.05.2006	12548329	PKVM220
VariMed	250 x 35	2130	11.11.05.2006	12548335	PKVM250
PhysiForm	40 x 40	300	11.11.05.0033	12548424	PKPF40
PhysiForm	60 x 40	520	11.11.05.0033	12548447	PKPF60
PhysiForm	70 x 50	880	11.11.05.0033	12548298	PKPF70
PhysiForm Kopfkissen	70 x 50	1005	11.11.05.0033	12548306	PKPF70K
Handkissen	14 x 11	14	-	12548358	PKHK
Keil	25 x 20 x 10-1	240	11.11.05.1026	12548418	PKKL
Halbrolle	25 x 12 x 7,5	150	11.11.05.1024	12548364	PKHR
Keilkissen XS	50 x 11 x 6	270	11.11.05.1025	12548341	PKXSK

Verwendete Materialien		Bezüge	
VariMed PhysiForm Handkissen	vollvernähtes Polyestergewebe mit EPS-Mikroperlenfüllung	Inkontinenz- schutzbezug	vollvernähtes PU-beschichtetes Polyestergewebe
Keil Keilkissen XS	Kaltschaumstoff: Raumgewicht 55 kg/m ³ , Stauchhärte 4,2 kPa PU-Schaumstoff, Raumgewicht 60 kg/m ³ , Stauchhärte 7,0 kPa	Baumwollbezug	100 % Baumwolle
Halbrolle	Kaltschaumstoff: Raumgewicht 55 kg/m ³ , Stauchhärte 2,5 kPa PU-Schaumstoff, Raumgewicht 60 kg/m ³ , Stauchhärte 7,0 kPa	Hygiene-Bezug	Anti-Allergiebezug aus Baumwollmischgewebe

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Die Reinigung und Desinfektion der Positionierungshilfen erfolgt regelmäßig mit dem Waschen bzw. Desinfizieren des abnehmbaren Baumwollbezuges. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise und das entsprechende Waschetikett am Bezug. Verwenden Sie handelsübliche Reinigungsmittel und auf Alkoholbasis hergestellte Desinfektionsmittel. Vor dem Wiedereinsatz der Kissen sollte der Bezug vollständig trocken sein.

Bei allen Reinigungs- und Desinfektionsverfahren dürfen kein Äthylenoxid, kein Formaldehyd und keine Phenole verwendet werden. Verwenden Sie auch keine Scheuermittel oder Mittel die ätzende Substanzen, Säuren oder Bleiche enthalten und keine Mittel auf Basis von Chlor, Aceton oder Benzol.

Reinigung

- Die PurplePos Positionierungshilfen sind für die Reinigung in der Waschmaschine nicht geeignet.
- Die PurplePos Positionierungshilfen können bei leicht und/oder hartnäckigen Verschmutzungen mit einem angefeuchteten Tuch und einem milden, haushaltsüblichen Reinigungs-/Desinfektionsmittel abgewischt werden.
- Der Baumwollbezug ist waschmaschinengeeignet, waschbar bei 60°C.
- Der Hygiene-Bezug ist waschmaschinengeeignet, waschbar bei 60°C.

Wisch- und Flächendesinfektion:

- Das Desinfektionsmittel wird flächendeckend auf den Bezug aufgetragen und wirkt ein. Bei gebrauchsfertigen Desinfektionsmitteln kann das Mittel mit Hilfe einer Sprühflasche auf die zu desinfizierende Fläche gebracht werden.

Ausführliche Informationen zur Reinigung und Desinfektion finden Sie unter www.kubivent.com.

WIEDEREINSATZ / PATIENTENWECHSEL

Der Wiedereinsatz der Positionierungshilfen bei anderen Personen ist nicht vorgesehen.

SICHERE ENTSORGUNG

Die Positionierungshilfen sind fachgerecht auf dem Sperrmüll oder einem Wertstoffhof zu entsorgen. Das Produkt hat keine physikalischen oder mikrobiologischen Gefahrenpotentiale, die bei der Entsorgung beachtet werden müssen.

SICHERHEITSHINWEIS

Alle Kissen mit dem standardmäßigen Inko-Schutzbezug sind brandschutzgeprüft nach DIN EN 597 1-2. Der Baumwoll- und der Hygiene-Bezug haben keine flammhemmende Ausrüstung. Rauchen und das Anwenden einer Flamquelle in unmittelbarer Nähe ist zu vermeiden.

LIEFERUMFANG

PurplePos Positionierungshilfe
1x KUBIVENT PurplePos Positionierungshilfe
1x Baumwollbezug (abnehmbar)
1x Gebrauchsanleitung
1x Folienverpackung

KONSULTATION EINES ANGEHÖRIGEN DER GESUNDHEITSBERUFE, MELDEPFLICHT

Wenn Ihnen die Anwendung des Produktes nicht geläufig ist und Sie beim Einsatz Hilfestellung benötigen, steht Ihnen unser Fachpersonal gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne.

Bei allergischen Reaktionen auf der Haut konsultieren Sie einen Arzt. Bitte beachten Sie, dass alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden sind. Schwerwiegende Vorfälle im Sinne des Gesetzes sind alle unerwünschten Ereignisse, die eine der nachstehenden Folgen hatten: Tod, lebensbedrohliche Erkrankung oder Verletzung, bleibende Körperschäden, chronische Erkrankungen oder fötale Gefährdung.

WARTUNG DURCH DEN ANWENDER

Grundsätzlich muss keine Wartung durch den Anwender durchgeführt werden.

HERSTELLUNG UND VERTRIEB



KUBIVENT **Purple**Pos Positionierungshilfen werden ausschließlich von der Firma KUBIVENT Sitz- und Liegepolster GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben.

Die PurplePos Positionierungshilfen sind Medizinprodukte der Klasse I und als solche CE-gekennzeichnet.