

## LIEFERUMFANG

Compact DuoCare Matratze inkl. Trikotbezug	Compact DuoCare Matratze inkl. Polyesterbezug
1x Compact DuoCare (Matratzenkern)	1x Compact DuoCare (Matratzenkern)
1x Trikotbezug (abnehmbar)	1x Polyesterbezug (abnehmbar)
1x Gebrauchsanleitung	1x Gebrauchsanleitung
1x Folienverpackung	1x Folienverpackung

## SICHERHEITSHINWEISE

Das Rauchen und Anwenden einer Flammquelle in unmittelbarer Nähe sollte vermieden werden.

KONSULTATION EINES ANGEHÖRIGEN  
DER GESUNDHEITSBERUFE, MELDEPFLICHT

Wenn Ihnen die Anwendung des Produktes nicht geläufig sein sollte und Sie beim Einsatz Hilfestellung benötigen, steht Ihnen unser Fachpersonal für Rückfragen gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne.

Bei allergischen Reaktionen auf der Haut konsultieren Sie einen Arzt. Bitte beachten Sie, dass alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden sind. Schwerwiegende Vorfälle im Sinne des Gesetzes sind alle unerwünschten Ereignisse, die eine der nachstehenden Folgen hatten: Tod, lebensbedrohliche Erkrankung oder Verletzung, bleibende Körperschäden, chronische Erkrankungen oder fötale Gefährdung.

## WARTUNG DURCH DEN ANWENDER

Grundsätzlich muss keine Wartung durch den Anwender durchgeführt werden.

## HERSTELLUNG UND VERTRIEB



KUBIVENT Compact DuoCare Matratzen werden ausschließlich von der Firma KUBIVENT Sitz- und Liegepolster GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben.

Die Matratzen sind Medizinprodukte der Klasse I und als solche CE-gekennzeichnet.

## STANDARD-PROPHYLAXE-MATRATZEN

Gebrauchsanleitung  
KUBIVENT Compact DuoCare

PU- und Kaltschaummatratze mit Längseinschnitten und Wellenschnitt im Unterbau



## EINSATZBEREICHE UND ZWECKBESTIMMUNG

Die **KUBIVENT Compact DuoCare** unterstützt bei entsprechenden pflegerischen Maßnahmen die Dekubitusprophylaxe bei Personen die aufgrund von Krankheit oder Handicap dauerhaft oder überwiegend bettlägrig sind und ein Pflegebett benötigen. Die Matratze ist aufgebaut nach den Spezifikationen der jeweiligen Krankenkassen und dadurch geeignet für den Einsatz im Klinik- und Privatbereich als Ausstattung handelsüblicher Pflegebetten.

Grundsätzlich sollte der Einsatz der Matratze von geschultem Fachpersonal eingeschätzt werden.

## INDIKATIONEN UND ZU ERWARTENDER KLINISCHER NUTZEN

Die Matratze unterstützt eine angenehme und weiche Lagerung des Anwenders. Der verwendete Kaltschaumstoff in der Liegefläche bildet die Grundlage für eine gute Druckverteilung. Der Unterbau mit Welleneinschnitten, sorgt für eine optimale Unterstützung der Wirbelsäule und ermöglicht eine gute Anpassung an die Körperform und die jeweilige Liegeposition. Die Längseinschnitte in der Liegefläche reduzieren Scherkräfte, wie sie z. B. bei Pflegemaßnahmen auftreten. Außerdem ermöglicht die Kombination der Einschnitte eine gute Belüftung und beugt damit dem Wärme- und Feuchtigkeitsstau vor.

## VERWENDUNG DER MATRATZE IN BETTEN MIT VERSTELLBARER LIEGEFLÄCHE

Bei Personen, die aufgrund Ihrer Erkrankung/Behinderung häufig mit hochgestelltem Kopfteil im Bett sitzen, wird eine härtere Matratze empfohlen, damit auch beim Sitzen eine gute Druckverteilung und Druckentlastung im Sakralbereich gewährleistet und ein Durchsitzen vermieden werden kann.

## EINSATZ DER MATRATZE IN BETTEN MIT SEITENGITTERN

Aufgrund der Matratzenhöhe von 12 cm sind beim Einsatz der handelsüblichen Seitengitter keine Einschränkungen vorhanden. Der Mindestabstand von 22 cm zwischen Oberkante Matratze und Oberkante Seitengitter ist zu beachten. Empfehlenswert ist der Einsatz von sogenannten Seitengitterpolstern, um ein Einklemmen in den Seitengittern zu vermeiden.

## ANWENDUNGSRISIKEN UND KONTRAINDIKATIONEN

### Allergien

Die Matratzen dürfen nicht bei bestehenden Schaumstoffallergien eingesetzt werden.

### Inkontinenz

Bei vorliegender Inkontinenz sollte ein passender Inkontinenzschutzbezug verwendet werden. Diese werden in allen passenden Größen als Zubehör angeboten.

### Dekubitus

Für Dekubitus-Therapie und-Prophylaxe empfehlen wir den Einsatz unserer Anti-Dekubitus-Matratzen.

### Gewichtsbeschränkungen

Durch Überschreiten der angegebenen Gewichtsbeschränkungen der Matratze bei zu schweren Patienten kann die Matratze durchgelegen werden.


Höhe/Ausführung	12 cm
Einsatzbereich	0-120 kg

## SACHGERECHTE ANWENDUNG

Die Matratze ist für den Einsatz im Pflegebett oder auch handelsüblichen Betten geeignet. Die Oberseite/Liegefläche der Matratze ist gekennzeichnet, sodass die Längseinschnitte nach oben gerichtet sind.


## TECHNISCHE DATEN

Querschnitt der **Compact DuoCare** 12 cm

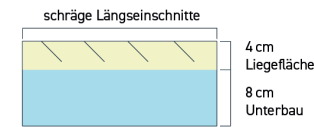

Schematische, technische Illustration eines Matratzen-Ausschnitts

Längsschnitt der **Compact DuoCare** 12 cm

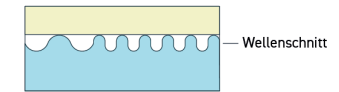

Matratzengrößen und Gewichte			
Höhe 12 cm		inkl. schwer entzündbarem Polyesterbezug	inkl. schwer entzündbarem Trikotbezug
Größe	Gewicht	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
190 x 90 x 12 cm	7,3 kg	WM102-BWSW2SC	WM102-BWSW2
200 x 90 x 12 cm	7,8 kg	WM103-BWSW2SC	WM103-BWSW2
200 x 100 x 12 cm	8,5 kg	WM104-BWSW2SC	WM104-BWSW2

Verwendete Materialien für Matratzen und Bezüge	
Liegefläche	Kaltschaum: Raumgewicht 40 kg/m <sup>3</sup> , Stauchhärte 3,0 kPa
Unterbau	PU-Schaum: Raumgewicht 35 kg/m <sup>3</sup> , Stauchhärte 4,2 kPa
Bezüge	Trikotbezug, Polyesterbezug
Schwer entzündbar nach DIN 597 1/2	

## REINIGUNG UND DESINFEKTION

Die Reinigung und Desinfektion der Matratze erfolgt regelmäßig durch Abnehmen und Waschen bzw. Desinfizieren des Bezuges. Zu beachten sind die nachfolgenden Hinweise und das entsprechende Waschetikett am Bezug. Verwenden Sie handelsübliche Reinigungsmittel und auf Alkoholbasis hergestellte Desinfektionsmittel. Vor dem Wiedereinsatz der Matratze muss die Matratze/der Bezug vollständig trocknen. Bei allen Reinigungs- und Desinfektionsverfahren dürfen kein Äthylenoxid, kein Formaldehyd und keine Phenole verwendet werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Mittel, die ätzende Substanzen, Säuren oder Bleiche enthalten sowie keine Mittel auf Basis von Chlor, Aceton oder Benzol.

### Matratzenkern

- Der Matratzenkern ist für die Reinigung in der Waschmaschine nicht geeignet.
- Der Matratzenkern kann mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einem milden, haushaltsüblichen Reinigungs-/ Desinfektionsmittel abgewischt werden.

### Bezüge

#### Waschmaschine:

- waschmaschinengeeignet bis 60°C,
- Desinfektion mit Desinfektionsvollwaschmittel möglich,
- wäschetrocknergeeignet bei niedriger Temperatur.

#### Wis- und Flächendesinfektion:

- Das Desinfektionsmittel wird flächendeckend auf den Bezug aufgetragen. Gebrauchsfertige Desinfektionsmittel können mithilfe einer Sprühflasche auf die zu desinfizierende Fläche gebracht werden.

Ausführliche Informationen zur Reinigung und Desinfektion finden Sie unter [www.kubivent.com](http://www.kubivent.com).

## WIEDEREINSATZ / PATIENTENWECHSEL

Der Wiedereinsatz der Matratze bei anderen Personen ist nicht vorgesehen.

## SICHERE ENTSORGUNG

Die Matratze ist fachgerecht auf dem Sperrmüll oder einem Wertstoffhof zu entsorgen. Das Produkt hat keine physikalischen oder mikrobiologischen Gefahrenpotentiale, die bei der Entsorgung beachtet werden müssen.