

WIEDEREINSATZ / PATIENTENWECHSEL

Ein Wiedereinsatz des **KUBIVENT VarioSlide** bei verschiedenen Personen ist grundsätzlich möglich. Voraussetzung ist, dass das Produkt fachgerecht gereinigt und desinfiziert wurde und keine sichtbaren Schäden oder Abnutzungen vorliegen. Bei Unsicherheit oder festgestellten Mängeln darf das Produkt nicht erneut verwendet werden. In diesem Fall ist es zu ersetzen.

NUTZUNGSDAUER

Vor jeder Verwendung sowie nach jeder Reinigung sollte das Produkt sorgfältig auf Mängel und Schäden überprüft werden. Eine regelmäßige Kontrolle und sorgfältige Handhabung tragen wesentlich zur Verlängerung der Lebensdauer bei. Bei sachgemäßer Anwendung kann das **KUBIVENT VarioSlide** eine Nutzungsdauer von bis zu 5 Jahren erreichen.

SICHERE ENTSORGUNG

Das **KUBIVENT VarioSlide** kann im Hausmüll entsorgt werden, sofern keine anderen rechtlichen oder betrieblichen Vorgaben bestehen. Das Produkt enthält keine umwelt- oder gesundheitsgefährdenden Stoffe. Es sind keine besonderen Schutzmaßnahmen bei der Entsorgung erforderlich.

SICHERHEITSHINWEIS

- Das **KUBIVENT VarioSlide** darf nur während der aktiven Anwendung eingesetzt werden. Lassen Sie es nicht unbeaufsichtigt im Bett liegen – Sturzgefahr!
- Lagern Sie das Produkt nach Gebrauch sicher und trocken. Das Material ist gleitfähig – vermeiden Sie das Ablegen auf dem Boden – Sturzgefahr!
- Rauchen oder offene Flammen in unmittelbarer Nähe des Produkts sind zu vermeiden – Brandgefahr!
- Die Anwendung sollte nur durch geschultes oder eingewiesenes Personal erfolgen.

LIEFERUMFANG

PurpleTrans VarioSlide Transferhilfe
1x PurpleTrans VarioSlide
1x Gebrauchsanleitung
1x Folienverpackung

**KONSULTATION EINES ANGEHÖRIGEN
DER GESUNDHEITSBERUFE, MELDEPFLICHT**

Wenn Ihnen die Anwendung des Produktes nicht geläufig ist und Sie beim Einsatz Hilfestellung benötigen, steht Ihnen unser Fachpersonal gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne.
Bei allergischen Reaktionen auf der Haut konsultieren Sie einen Arzt. Bitte beachten Sie, dass alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden sind. Schwerwiegende Vorfälle im Sinne des Gesetzes sind alle unerwünschten Ereignisse, die eine der nachstehenden Folgen hatten: Tod, lebensbedrohliche Erkrankung oder Verletzung, bleibende Körperschäden, chronische Erkrankungen oder fötale Gefährdung.

WARTUNG DURCH DEN ANWENDER

Grundsätzlich muss keine Wartung durch den Anwender durchgeführt werden.

HERSTELLUNG UND VERTRIEB

CE **KUBIVENT Transferhilfen** werden ausschließlich von der Firma Kubivent Sitz- und Liegepolster GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben.
Die **KUBIVENT PurpleTrans Transferhilfen** sind Medizinprodukte der Klasse I und als solche CE-gekennzeichnet.

**PurpleTrans Transferhilfen**

Gebrauchsanleitung KUBIVENT PurpleTrans VarioSlide

Gleitunterlage zur Mobilisierung

EINSATZBEREICHE UND ZWECKBESTIMMUNG

Das **KUBIVENT VarioSlide** ist als Transfer- und Mobilisierungshilfe für den Einsatz in der Pflege und im klinischen Alltag vorgesehen. Es erleichtert Transfer und Mobilisierung im Bett durch Reduktion von Reibungs- und Scherkräften und ermöglicht so einen schonenden und kraftsparenden Positionswechsel.

Das **KUBIVENT VarioSlide** unterstützt Pflegepersonen bei Umlagerungen, Positionskorrekturen und Transfers von Personen mit eingeschränkter Mobilität. Der Einsatz erfolgt unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und körperlichen Voraussetzungen der zu pflegenden Person.

Die Anwendung ist insbesondere geeignet bei:

- erheblichen bis vollständigen Bewegungsdefiziten,
- notwendiger Förderung der Eigenmobilität,
- der Durchführung von Positionswechseln oder Umlagerungen im Bett durch Pflege- oder Betreuungspersonal.

Das **KUBIVENT VarioSlide** kann in Betten mit verstellbarer Liegefläche verwendet werden. Bei der Anwendung ist darauf zu achten, dass die Transferhilfe korrekt positioniert wird, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Grundsätzlich sollte der Einsatz des VarioSlides von geschultem Fachpersonal eingeschätzt werden.

INDIKATIONEN UND ZU ERWARTENDER KLINISCHER NUTZEN

Das **KUBIVENT VarioSlide** ist für Personen vorgesehen, die aufgrund von Mobilitätseinschränkungen Unterstützung bei Positionswechseln im Bett benötigen. Dies umfasst insbesondere:

- Erheblich bis voll ausgeprägte Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (*durch Immobilität oder durch erhebliche Schädigung der Körperwahrnehmung*) oder bei neurologischen Erkrankungen zur Ermöglichung des Positionswechsels/der Umlagerung im Bett durch eine Hilfs-/Pflegepersonen,
- Personen mit eingeschränkter Eigenbeweglichkeit, die nicht selbstständig ihre Position im Bett verändern können,
- Patienten, bei denen durch manuelle Umlagerung eine Reduktion von Reibungs- und Scherkräften erforderlich ist, um Hautschädigungen zu vermeiden.

Der Einsatz des **KUBIVENT VarioSlide** kann dazu beitragen, die körperliche Belastung des Pflegepersonals zu reduzieren und gleichzeitig die Sicherheit und den Komfort des Patienten während des Positionswechsels zu erhöhen.

ANWENDUNGSRISIKEN UND KONTRAINDIKATIONEN

Anwendungsrisiken:

Bei unsachgemäßer Handhabung oder unbeaufsichtigtem Einsatz kann es zu folgenden Risiken kommen:

- erhöhte Sturzgefahr, wenn das **KUBIVENT VarioSlide** unbeaufsichtigt im Bett belassen oder auf dem Boden abgelegt wird,
- Erhöhung von Reibungs- und Scherkräften bei fehlerhafter Positionierung, insbesondere wenn der Körperschwerpunkt nicht vollständig auf dem Gleitmaterial liegt.

Die Anwendung sollte ausschließlich durch unterwiesenes oder geschultes Personal erfolgen. Bei Unsicherheiten ist vor der Nutzung fachlicher Rat einzuholen.

Kontraindikationen:

Es muss stets die individuelle gesundheitliche Situation der betroffenen Person berücksichtigt werden. Der Einsatz sollte vermieden werden bei:

- offenen Wunden oder Hautläsionen im Kontaktbereich ohne adäquaten Schutz,
- instabilen Frakturen oder anderen Konstellationen, bei denen eine Bewegung ohne vollständige Lagerungskontrolle kontraindiziert ist.

SACHGERECHTE ANWENDUNG UND MONTAGEHINWEIS

Das Produkt ist vollständig montiert und kann nach dem Auspacken sofort verwendet werden. Vor dem Einsatz ist sicherzustellen, dass das **KUBIVENT VarioSlide** frei von sichtbaren Beschädigungen ist und korrekt vorbereitet wurde. Die gleitfähige Seite muss nach innen zeigen; erkennbar unter anderem am innenliegenden Waschetikett. Die geschlossene Seite der Gleitunterlage zeigt dabei in die gewünschte Transferrichtung.

Die sachgerechte Anwendung erfolgt wie folgt:

- Der Patient wird zunächst in eine Seitenlage gebracht.
- Das VarioSlide wird entlang der Körperachse untergeschoben.
- Der Patient wird anschließend zurück auf den Rücken gelagert, sodass die Körperschwerpunkte (*z. B. Gesäß, Schultern und ggf. Kopf*) vollständig auf dem **VarioSlide** zu liegen kommen.
- Die Beine werden angewinkelt. Durch aktives Abstützen der Füße wird die Eigenmobilität beim Transfer gefördert.
- Zur Stabilisierung empfehlen wir zusätzlich das Produkt **KUBIVENT AntiSlide**.

Die Anwendung ist ausschließlich während aktiver Transfers oder Umlagerungen vorgesehen. Das **KUBIVENT VarioSlide** ist nach abgeschlossener Anwendung unmittelbar zu entfernen und sicher zu verwahren.

TECHNISCHE DATEN

HMV-Nr.: 22.29.01.2072 PZN: 16659474			
Größen und Gewichte			
Artikel-Nr.	Größe (L x B)	Gewicht	Empfohlen für Körpergrößen
THVS10080	100 x 80 cm	180 g	bis 165 cm
THVS14080	140 x 80 cm	195 g	ab 165 cm



Einsatzbereich: bis 150 kg Körpergewicht

Material: 100 % Polyamid Faser

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Damit das **VarioSlide** hygienisch und sicher eingesetzt werden kann, ist eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion notwendig. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:

Reinigung:

Das **KUBIVENT VarioSlide** kann in der Waschmaschine bei bis zu 95 °C gewaschen werden. Wir empfehlen eine 60 °C-Wäsche, um das Material zu schonen. **Verwenden Sie kein Weichspüler, da dieser die Gleitfähigkeit beeinträchtigen kann.** Nach dem ersten Waschen kann es zu einem leichten Größenverlust (*bis zu 2 cm*) kommen. Trocknen Sie das Produkt bei niedriger Temperatur im Wäschetrockner oder an der Luft. Zur Desinfektion in der Waschmaschine verwenden Sie ein Desinfektionsvollwaschmittel, das für die Maschinenwäsche geeignet ist. Beachten Sie die Dosierung und Anwendungshinweise des Desinfektionsmittel-Herstellers.

Wischdesinfektion:

Verwenden Sie ein Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis (*aus Drogerie oder Fachhandel*). Tragen Sie das Mittel auf die gesamte Oberfläche auf, z. B. mit einem Desinfektionstuch oder einer Sprühflasche. Lassen Sie das Mittel gemäß Herstellerangabe einwirken und wischen Sie es nicht mit Wasser nach.

Wichtig:

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel wie Bleichmittel, Chlor, Aceton oder Scheuermittel. Kein Einsatz von Äthylenoxid, Formaldehyd oder Phenolen. Prüfen Sie das Produkt nach der Reinigung auf sichtbare Schäden, bevor Sie es erneut verwenden.

Ausführliche Informationen zur Reinigung und Desinfektion finden Sie unter www.kubivent.com.