

SICHERE ENTSORGUNG

Das **KUBIVENT StandUp** kann im Hausmüll entsorgt werden, sofern keine anderen rechtlichen oder betrieblichen Vorgaben bestehen. Das Produkt enthält keine umwelt- oder gesundheitsgefährdenden Stoffe. Es sind keine besonderen Schutzmaßnahmen bei der Entsorgung erforderlich.

SICHERHEITSHINWEIS

Das **KUBIVENT StandUp** ist ausschließlich zur Verwendung während aktiver Transfers oder Mobilisationsmaßnahmen bestimmt und darf nicht unbeaufsichtigt am Patienten verbleiben.

- Beim Umsetzen und Aufrichten besteht erhöhte Sturzgefahr. Der Einsatz des StandUp darf nur durch geschultes oder eingewiesenes Fachpersonal erfolgen.
- Bei erhöhtem Risiko ist das Hinzuziehen einer zweiten Person zur Absicherung empfohlen.
- Rauchen oder der Einsatz von offenen Flammen in unmittelbarer Nähe des Produkts ist zu vermeiden – Brandgefahr!
- Der Gurt ist unmittelbar nach der Anwendung zu entfernen und sicher zu verstauen.

LIEFERUMFANG

PurpleTrans StandUp Transferhilfe
1x PurpleTrans StandUp
1x Gebrauchsanleitung
1x Folienverpackung

KONSULTATION EINES ANGEHÖRIGEN DER GESUNDHEITSBERUFE, MELDEPFLICHT

Wenn Ihnen die Anwendung des Produktes nicht geläufig ist und Sie beim Einsatz Hilfestellung benötigen, steht Ihnen unser Fachpersonal gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne. Bei allergischen Reaktionen auf der Haut konsultieren Sie einen Arzt. Bitte beachten Sie, dass alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden sind. Schwerwiegende Vorfälle im Sinne des Gesetzes sind alle unerwünschten Ereignisse, die eine der nachstehenden Folgen hatten: Tod, lebensbedrohliche Erkrankung oder Verletzung, bleibende Körperschäden, chronische Erkrankungen oder fötale Gefährdung.

WARTUNG DURCH DEN ANWENDER

Grundsätzlich muss keine Wartung durch den Anwender durchgeführt werden.

HERSTELLUNG UND VERTRIEB



KUBIVENT Transferhilfen werden ausschließlich von der Firma Kubivent Sitz- und Liegepolster GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben.

Die **KUBIVENT PurpleTrans Transferhilfen** sind Medizinprodukte der Klasse I und als solche CE-gekennzeichnet.



PurpleTrans Transferhilfen

Gebrauchsanleitung KUBIVENT PurpleTrans StandUp

Aufrichthilfe zum Patiententransfer

EINSATZBEREICHE UND ZWECKBESTIMMUNG

Das **KUBIVENT StandUp** ist eine Aufrichthilfe zur Unterstützung beim kraftminimierten und rückschonenden Transfer von Personen aus dem Sitzen in den Stand oder vom Bett in einen Stuhl (*und umgekehrt*). Er dient der sicheren Mobilisation von Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit sowie dem ergonomischen Arbeiten für Pflegekräfte.

Typische Einsatzbereiche sind:

- Transfer vom Bett in den Rollstuhl oder auf andere Sitzgelegenheiten,
- Aufrichten aus einer stabilen Sitzposition in den Stand.

Das Produkt wurde entwickelt für Personen mit:

- erheblich bis vollständig eingeschränkter Fähigkeit zur selbstständigen Positionsverlagerung,
- Mobilitätsdefiziten im Bereich der unteren Extremitäten,
- Bedarf an gezielter Unterstützung beim Aufrichten, Umlagern oder Umsetzen.

Das **KUBIVENT StandUp** bietet durch seine integrierten Griffe und das rutschhemmende Material zusätzliche Sicherheit beim Handling. Die Anwendung erfolgt unter Berücksichtigung des individuellen Gesundheitszustands der betreffenden Person.

Grundsätzlich sollte der Einsatz des StandUp von geschultem Fachpersonal eingeschätzt werden.

INDIKATIONEN UND ZU ERWARTENDER KLINISCHER NUTZEN

Indikationen:

- Erheblich bis voll ausgeprägte Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (*durch Immobilität oder durch erhebliche Schädigung der Körperwahrnehmung*) oder bei neurologischen Erkrankungen zur Ermöglichung des Positionswechsels/der Umlagerung im Bett durch eine Hilfs-/Pflegepersonen
- erhebliche bis vollständige Einschränkung der Mobilität, insbesondere im Bereich der unteren Extremitäten,
- mangelnde Standstabilität bei gleichzeitig vorhandener Sitzfähigkeit,
- eingeschränkte Fähigkeit zur selbstständigen Gewichtsverlagerung,
- Mobilisationsbedarf im Rahmen pflegerischer, geriatrischer oder rehabilitativer Maßnahmen.

Zu erwartender klinischer Nutzen:

- Erhöhung der Sicherheit bei der Mobilisation,
- Förderung der Eigenaktivität durch gezielte Gewichtsverlagerung auf die Füße durch den Patienten,
- Reduzierung von Sturz- und Verletzungsrisiken durch kontrollierten und geführten Transfer und Prävention von Überlastung des Pflegepersonals (*z. B. Rückenbeschwerden*).
- Reduktion des körperlichen Kraftaufwands für Pflege- und Betreuungspersonal beim Aufrichten und Umsetzen.

Der Einsatz erfolgt im pflegerischen, klinischen oder betreuten Umfeld und sollte durch unterwiesenes Personal durchgeführt oder angeleitet werden.

ANWENDUNGSRISIKEN UND KONTRAINDIKATIONEN

Bei unsachgemäßer Anwendung können folgende Risiken auftreten:

- Sturzgefahr, insbesondere bei unkontrolliertem Aufrichten oder Abrutschen,
- Verletzungsrisiko durch fehlerhafte Handhabung oder unzureichende Fixierung.

Bei schwer mobilisierbaren Personen kann die Unterstützung durch eine zweite Hilfsperson erforderlich sein.

Es muss stets die individuelle gesundheitliche Situation der betroffenen Person berücksichtigt werden. Der Einsatz sollte vermieden werden bei Personen:

- die nicht stabil oder frei sitzen können,
- mit unzureichender Rumpf- oder Körperspannung,
- bei denen eine aktive oder unterstützte Sitz- oder Standposition medizinisch kontraindiziert ist.

SACHGERECHTE ANWENDUNG UND MONTAGEHINWEIS

Das Produkt ist vollständig montiert und kann nach dem Auspacken sofort verwendet werden. Vor dem Einsatz ist sicherzustellen, dass das **KUBIVENT StandUp** frei von sichtbaren Beschädigungen ist und korrekt vorbereitet wurde.

- Das **KUBIVENT StandUp** wird im Beckenbereich der sitzenden Person angelegt. Achten Sie darauf, dass das integrierte Anti-Rutsch-Material mittig positioniert ist.

- Nehmen Sie einen sicheren Stand vor der Person ein, greifen Sie die Handgriffe und führen Sie den Transfer in den Stand kontrolliert durch. Der Patient sollte – sofern möglich – aktiv unterstützen, indem er das Gewicht nach vorne auf die Füße verlagert.
- Zur weiteren Stabilisierung wird ergänzend der Einsatz vom **KUBIVENT HoldUp** empfohlen. Ein Sicherungsgürtel für die Pflegekraft, an dem sich der Patient beim Aufrichten und Umsetzen festhalten und damit die Bewegung durch Gewichtsverlagerung weiter unterstützen kann.

Die Anwendung ist auf eine kurze Dauer und ausschließlich während aktiver Transfers oder Umlagerungen beschränkt. Das **KUBIVENT StandUp** ist nach abgeschlossener Anwendung unmittelbar zu entfernen und sicher zu verwahren.

TECHNISCHE DATEN

HMV-Nr.: 22.29.01.0069 PZN: 16659468		
Größen und Gewichte		
Artikel-Nr.	Größe (L x B)	Gewicht
THSU7520	75 x 20 cm	540 g



Einsatzbereich: bis 150 kg Körpergewicht

Material Stoff: 100 % Polyester, PU-beschichtetes Polyestergerwirke

Material Platte: 100% PVC, Kunststoffplatte schwarz, Größe: 72 x 15 x 0,02 cm

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Damit das **KUBIVENT StandUp** hygienisch und sicher eingesetzt werden kann, ist eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion erforderlich. Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Reinigung:

Handwäsche (empfohlen): Das **StandUp** kann mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel (*z. B. Seife*) gereinigt werden. Grobe Verschmutzungen sind vorab zu entfernen.

Maschinenwäsche (nur bei starker Verschmutzung): Das **StandUp** kann bei 60°C in der Waschmaschine gewaschen werden. Die Maschinenreinigung belastet das Material stark und sollte nur im Ausnahmefall erfolgen. Verwenden Sie keinen Weichspüler, da dieser die Materialeigenschaften negativ beeinflusst. Trocknen Sie die Disk nicht im Wäschetrockner, sondern an der Luft.

Wichtig: Vor jeder Reinigung muss die herausnehmbare Kunststoffplatte entnommen werden. Diese lässt sich nach der Reinigung wieder einsetzen.

Desinfektion:

Wischdesinfektion: Geeignet sind Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis, die im Fach- oder Drogeriehandel erhältlich sind. Tragen Sie das Mittel mit einem Desinfektionstuch oder einer Sprühflasche gleichmäßig auf die Oberfläche auf. Beachten Sie die Einwirkzeit laut Herstellerangabe und lassen Sie das Produkt vollständig an der Luft trocknen. Nicht mit Wasser nachwischen.

Wichtige: Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Desinfektionsmittel, insbesondere keine Produkte mit: Äthylenoxid, Formaldehyd, Phenolen, Bleichmitteln, Aceton, Chlor oder Scheuermitteln. Prüfen Sie das Produkt nach der Reinigung auf sichtbare Schäden, bevor Sie es erneut verwenden.

Ausführliche Informationen zur Reinigung und Desinfektion finden Sie unter www.kubivent.com.

WIEDEREINSATZ UND PATIENTENWECHSEL

Ein Wiedereinsatz des **KUBIVENT StandUp** bei verschiedenen Personen ist grundsätzlich möglich. Voraussetzung ist, dass das Produkt fachgerecht gereinigt und desinfiziert wurde und keine sichtbaren Schäden oder Abnutzungen vorliegen. Bei Unsicherheit oder festgestellten Mängeln darf das Produkt nicht erneut verwendet werden. In diesem Fall ist es zu ersetzen.

NUTZUNGSDAUER

Vor jeder Verwendung sowie nach jeder Reinigung sollte das Produkt sorgfältig auf Mängel und Schäden überprüft werden. Eine regelmäßige Kontrolle und sorgfältige Handhabung tragen wesentlich zur Verlängerung der Lebensdauer bei. Bei sachgemäßer Anwendung kann das **KUBIVENT StandUp** eine Nutzungsdauer von bis zu 5 Jahren erreichen.