



Reinigungshinweise zu **KUBIVENT** Produkten

Reinigung und Desinfektion

Änderungen vorbehalten · Stand 05/2026 · AGB siehe [kubivent.com](https://www.kubivent.com)



VERWENDUNG VON REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSMITTELN

Grundsätzlich sind alle haushaltsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Reinigung und Desinfektion unserer Produkte geeignet. Wir empfehlen die Verwendung milder, handelsüblicher Reinigungsmittel sowie VAH-gelisteter und materialverträglicher Flächendesinfektionsmittel, insbesondere alkoholbasierter Mittel (z. B. Bacillol AF, Meliseptol® pure).

Bei der Auswahl des Reinigungs- und Desinfektionsmittels ist zu beachten, dass kein Äthylennoxid, kein Formaldehyd und keine Phenole verwendet werden. Verwenden Sie auch keine Scheuermittel oder Mittel, die ätzende Substanzen, Säuren oder Bleiche enthalten, und keine Mittel auf Basis von Chlor, Aceton oder Benzol.

Beachten Sie vor dem Einsatz die Sicherheits- und Anwendungshinweise des Reinigungs- und Desinfektionsmittelherstellers. Dosieren Sie das Mittel nach dem Dosierplan, welcher auf dem Etikett oder in der Packungsbeilage des Herstellers angegeben ist.

Beachten Sie zudem unsere Waschinweise in der Gebrauchsanleitung des Produktes oder auf den Waschetiketten am Bezug.

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Wisch- und Flächendesinfektion/-reinigung

Benetzen Sie alle Flächen und lassen Sie das Mittel in der vom Hersteller vorgeschriebenen Zeit einwirken. Die Wirkstoffe des Mittels müssen direkt auf die Fläche gelangen. Bei gebrauchsfertigen Desinfektionsmitteln kann das Mittel mit Hilfe einer Sprühflasche oder einem in Desinfektionsmittel getränktem Tuch auf die zu desinfizierende Fläche gebracht und mit Wischbewegungen desinfiziert werden.

Grobe Verschmutzungen können die volle Benetzung verhindern und sollten vor der Desinfektionsmaßnahme, beispielsweise mit einer Bürste, entfernt werden. Nur so kann die volle Wirkung des Mittels erreicht werden. Waschen Sie das Desinfektionsmittel nach einer Wischdesinfektion nicht mit Wasser ab und lassen Sie es an der Luft abtrocknen. Beim Einsatz von Konzentraten beachten Sie zudem die vom Hersteller beschriebenen Dosierungsinformationen.

Besondere Hinweise Kissen- und Matratzenkerne (Schaumstoffprodukte)

Unsere Schaumstoffkerne von Kissen und Matratzen sind für die Reinigung in der Waschmaschine nicht geeignet. Ausnahme sind unsere Würfelprodukte, bei denen einzelne Würfel entnommen und in der Waschmaschine bei max. 60 °C gereinigt werden können. Vor dem Wiedereinsetzen der Würfel sollte der Schaumstoff vollständig trocknen. Im Falle einer Verschmutzung des Kissen- oder Matratzenkerns können Sie die oben beschriebene Wisch- und Flächendesinfektion anwenden. Achten Sie bei der Reinigung und Desinfektion darauf, dass der Schaumstoff nicht zu feucht wird und vor dem Wiedereinsatz vollständig trocknet.

Besondere Hinweise Bezüge

Unsere Kissen- und Matratzenbezüge sind für die Reinigung in der Waschmaschine geeignet. Zur Auswahl der Temperatur beachten Sie die Angaben in der Gebrauchsanleitung und an den Waschetiketten am Produkt. Schließen Sie alle Reißverschlüsse vor dem Befüllen der Waschmaschine, um Schäden am Bezug oder der Waschmaschine zu vermeiden. Durch die Verwendung eines Desinfektionsvollwaschmittels kann die Desinfektion des Bezuges auch beim Waschen in der Waschmaschine vorgenommen werden.

Zum Trocknen lassen Sie den Bezug an der Luft trocknen. Nicht alle Bezüge sind für die Anwendung eines Wäschetrockners geeignet. Beachten Sie hier ebenfalls die Anweisungen in der Gebrauchsanleitung oder auf dem Waschetikett am Produkt.

BÜGELN DER BEZÜGE

Einige Bezüge sind aufgrund der Materialzusammensetzung für das Bügeln ungeeignet. Bitte beachten Sie die Symbole und Hinweise am Produkt und in der Gebrauchsanleitung.

Wasserdampf vereinfacht das Bügeln. Sie können neben der Dampffunktion des Bügeleisens auch Wasser mit einer Sprühflasche auf den Stoff aufbringen. Verwenden Sie dabei weiches/kalkarmes Wasser. Lassen Sie das Bügeleisen nicht unbeaufsichtigt, um Brandflecken oder Feuer zu vermeiden. Aufdrucke dürfen nicht direkt mit dem Bügeleisen in Kontakt kommen, da diese bei hohen Temperaturen schmelzen. Bügeln Sie bedruckte Bezüge daher immer auf links.

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE AUF UNSEREN WASCHETIKETTEN

Icon	Erklärung
	Waschbar bei 60 °C, Normalprogramm.
	Kochwäsche max. 95 °C, Normalprogramm.
	Handwäsche bei max. 40 °C, sollte nicht in der Maschine gewaschen werden.
	Trocknergeeignet bei niedriger Temperatur, mit einer Auslass-temperatur von max. 60 °C.
	Nicht trocknergeeignet.
	Trommeltrocknen allgemein.
	Nicht Bleichen.
	Normale Reinigung. Fragen Sie Ihre Reinigung um Rat.
	Nicht chemisch reinigen (schädliche Auswirkungen durch Kohlenwasserstoffe oder andere organische Lösungsmittel).
	Bügeln, pressen, mit Dampf bei niedrigen Temperaturen, wobei die Bügeleisentemperatur max. 110 °C betragen darf.
	Bügeln, pressen, mit Dampf bei hohen Temperaturen, wobei die Bügeleisentemperatur max. 150 °C betragen darf.
	Nicht bügeln, nicht pressen, kein Dampf.