

Desinfektion: Tragen Sie das Mittel mit einem Desinfektionstuch oder einer Sprühflasche gleichmäßig auf die Oberfläche auf. Lassen Sie das Produkt vollständig an der Luft trocknen. Nicht mit Wasser nachwischen. Alternativ kann die Desinfektion mit einem Desinfektionsvollwaschmittel in der Waschmaschine erfolgen.

Ausführliche Informationen zur Reinigung und Desinfektion finden Sie unter kubivent.com.

WIEDEREINSATZ / PATIENTENWECHSEL

Ein Wiedereinsatz der Kissen ist grundsätzlich möglich. Voraussetzung hierfür ist eine sach- und fachgerechte Reinigung und Desinfektion (*hygienische Aufbereitung nach dem vom RKI gelisteten VDV-Verfahren*) des Kissens und des Bezuges. Eine entsprechende Wiedereinsatzreinigung entsprechend den Anforderungen des MPG wird von uns derzeit nicht angeboten.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter:

Tel.: +49 (0) 7181-475 060 oder per E-Mail an info@kubivent.com.

SICHERE ENTSORGUNG

Das Kissen ist fachgerecht auf dem Sperrmüll oder einem Wertstoffhof zu entsorgen. Das Produkt hat keine physikalischen oder mikrobiologischen Gefahrenpotentiale, die bei der Entsorgung beachtet werden müssen.

SICHERHEITSHINWEIS

Das Rauchen und Anwenden einer Flammquelle in unmittelbarer Nähe sollte vermieden werden.

LIEFERUMFANG

ConturaGel Light Kissen 8 cm mit Inkontinenzschutzbezug
1x ConturaGel Light (<i>Kissenkern</i>)
1x Inkontinenzschutzbezug (<i>abnehmbar</i>)
1x Gebrauchsanleitung
1x Kartonverpackung

KONSULTATION EINES ANGEHÖRIGEN DER GESUNDHEITSBERUFE, MELDEPFLICHT

Wenn Ihnen die Anwendung des Produktes nicht geläufig sein sollte und Sie beim Einsatz Hilfestellung benötigen, steht Ihnen unser Fachpersonal für Rückfragen gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne.

Bei allergischen Reaktionen auf der Haut konsultieren Sie einen Arzt. Bitte beachten Sie, dass alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden sind. Schwerwiegende Vorfälle im Sinne des Gesetzes sind alle unerwünschten Ereignisse, die eine der nachstehenden Folgen hatten: Tod, lebensbedrohliche Erkrankung oder Verletzung, bleibende Körperschäden, chronische Erkrankungen oder fötale Gefährdung.

WARTUNG DURCH DEN ANWENDER

Grundsätzlich muss keine Wartung durch den Anwender durchgeführt werden.

HERSTELLUNG UND VERTRIEB

KUBIVENT ConturaGel Light Kissen werden ausschließlich von der Firma **KUBIVENT Sitz- und Liegepolster GmbH**, Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben.

Die Sitzkissen sind Medizinprodukte der Klasse I und als solche CE-gekennzeichnet.



ANTI-DEKUBITUS-KISSEN

Gebrauchsanleitung KUBIVENT ConturaGelLight

Kaltschaumkissen mit Gel-Schaumsitzfläche und Geld-Pad

Therapie und
Prophylaxe

Nach Braden Skala
allgemein - hoch

EINSATZBEREICHE UND ZWECKBESTIMMUNG

Das **KUBIVENT ConturaGel Light** unterstützt bei entsprechenden pflegerischen Maßnahmen die Dekubitus-Prophylaxe und -Therapie,

- bei bereits bestehenden Dekubiti (*bis zum Dekubitus-Stadium III*) und
- bei Personen, die durch dauerhaftes Sitzen aufgrund von Krankheit oder Behinderung ein allgemeines bis hohes Dekubitus-Risiko (*nach Braden*) haben.

Aufgrund der Kombination von Schaumstoff und Gel-Pad im Bereich der Sitzbeinhöcker empfiehlt sich der Einsatz des Kissens besonders bei Patienten,

- bei denen die Sitzhaltung stabilisiert werden muss,
- bei denen eine gute Druckverteilung und Anpassung an die Körperform erforderlich ist,
- bei denen Scherkräfte reduziert werden sollen,
- mit teilweiser oder vollständiger Lähmung einer Körperhälfte,
- mit gestörter Wahrnehmung der unteren Gliedmaßen und
- mit beeinträchtigtem Allgemeinzustand.

Grundsätzlich sollte der Einsatz der Kissen von geschultem Fachpersonal eingeschätzt werden. Die Kissen sind für den Einsatz im Rollstuhl oder sonstigen Sitzgelegenheiten als vollständiges Sitzkissen konzipiert.

INDIKATIONEN UND ZU ERWARTENDER KLINISCHER NUTZEN

Das Kissen dient bei Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (*durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung*) mit drohender oder manifester Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (*Dekubitus/Druckgeschwür*) am Gesäß, wenn die Person noch in der Lage ist z. B. auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen zur Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses.¹⁾

ANWENDUNGSRISIKEN UND KONTRAINDIKATIONEN

Allergien

Das Kissen darf nicht bei bestehenden Schaumstoffallergien eingesetzt werden.

Inkontinenz

Das Kissen ist standardmäßig mit einem geschlossenen Inkontinenzschutzbezug ausgestattet.

Gewichtsbeschränkungen


Durch Überschreiten der angegebenen Gewichtsbeschränkungen der Kissen bei zu schweren Patienten kann das Kissen durchgesessen werden.

Höhe/Ausführung	8
Einsatzbereich	bis 120 kg
Empfohlen	0-90 kg

SACHGERECHTE ANWENDUNG

Das Kissen ist für den Einsatz im Rollstuhl, auf Sesseln oder Stühlen geeignet. Beim Einsatz der Kissen ist immer auch die Höhe des Kissens zu beachten und auf die jeweilige Sitzgelegenheit abzustimmen (*ggf. z. B. Anpassung der Armstützen des Rollstuhls*). Das Kissen wird so in den Rollstuhl oder auf den Stuhl gelegt, dass die 2 cm Trägerschicht mit dem Gel-Pad die Sitzfläche bildet. Die Kennzeichnung am Kissenkern sowie die Position des Gel-Pads weisen auf die Hinterseite des Kissens hin und werden zur Rückenlehne ausgerichtet. Das **KUBIVENT**-Logo Etikett am Bezug weist dabei nach vorne und der Reißverschluss nach unten und hinten.

TECHNISCHE DATEN

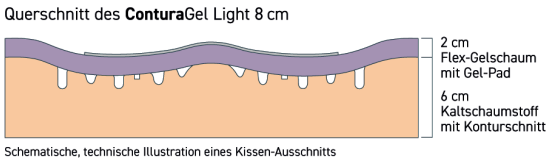

Kissengrößen und Gewichte							
HMV-Nr. mit Inkontinenzschutzbezug: 11.39.02.1024							
Artikel-Nr.	Größe Breite x Tiefe x Höhe	Gewicht	Ersatz-Inkobezug Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Größe Breite x Tiefe x Höhe	Gewicht	Ersatz-Inkobezug Artikel-Nr.
CONGL38408-I	38 x 40 x 8 cm	0,7 kg	BCONI38408	CONGL46488-I	46 x 48 x 8 cm	1,1 kg	BCONI46488
CONGL40428-I	40 x 42 x 8 cm	0,7 kg	BCONI40428	CONGL46518-I	46 x 51 x 8 cm	1,1 kg	BCONI46518
CONGL42428-I	42 x 42 x 8 cm	0,8 kg	BCONI42428	CONGL48428-I	48 x 42 x 8 cm	0,9 kg	BCONI48428
CONGL42458-I	42 x 45 x 8 cm	0,8 kg	BCONI42458	CONGL48458-I	48 x 45 x 8 cm	0,9 kg	BCONI48458
CONGL42488-I	42 x 48 x 8 cm	0,9 kg	BCONI42488	CONGL50458-I	50 x 45 x 8 cm	1,0 kg	BCONI50458
CONGL42508-I	42 x 50 x 8 cm	1,0 kg	BCONI42508	CONGL50508-I	50 x 50 x 8 cm	1,3 kg	BCONI50508
CONGL45428-I	45 x 42 x 8 cm	0,9 kg	BCONI45428	CONGL51438-I	51 x 43 x 8 cm	1,1 kg	BCONI51438
CONGL45458-I	45 x 45 x 8 cm	0,9 kg	BCONI45458	CONGL56468-I	56 x 46 x 8 cm	1,4 kg	BCONI56468

Verwendete Materialien für Kissen und Bezüge	
	8 cm
Gel-Pad	Weichgel auf Polymerbasis versiegelt in Kunststoffolie, Größe: 240 x 185 x 1,6 mm, Härtegrad: Shore 25°, vollverklebt auf der Sitzfläche
Sitzfläche	2 cm Flex-Gelschaum, Raumgewicht 48 kg/m³ mit einer Stauchhärte von 1,4 kPa
Unterbau	6 cm Kaltschaum, Raumgewicht 50 kg/m³ mit einer Stauchhärte von 5,0 kPa
Bezug	Inkontinenzschutzbezug aus PU-beschichtetem PES-Gewirke mit rutschhemmender Beschichtung an der Unterseite

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Komponenten stellt Hygiene und Langlebigkeit der Kissen sicher. Zu beachten sind die nachfolgenden Hinweise und das entsprechende Waschetikett am Bezug. Grundsätzlich sind alle haus-haltsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Reinigung und Desinfektion unserer Produkte geeignet. Wir emp-fehlen die Verwendung milder, handelsüblicher Reinigungsmittel sowie VAH-gelisteter und materialverträglicher Flächen-desinfektionsmittel, insbesondere alkoholbasierter Mittel (*z. B. Bacillol AF, Meliseptol® pure*). Bei der Auswahl des Reini-gungs- und Desinfektionsmittels ist zu beachten, dass kein Äthylenoxid, kein Formaldehyd und keine Phenole verwendet werden. Verwenden Sie auch keine Scheuermittel oder Mittel, die ätzende Substanzen, Säuren oder Bleiche enthalten, und keine Mittel auf Basis von Chlor, Aceton oder Benzol. Beachten Sie vor dem Einsatz die Sicherheits- und Anwendungshin-weise des Reinigungs- und Desinfektionsmittelherstellers. Dosieren Sie das Mittel nach dem Dosierplan, welcher auf dem Etikett oder in der Packungsbeilage des Herstellers angegeben ist.

Kissenkern

Der Kissenkern ist für die Reinigung in der Waschmaschine nicht geeignet. Der Kissenkern kann mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einem milden, haushaltsüblichen Reinigungs-/Desinfektionsmittel abgewischt werden. Vor dem Einsatz sollte der Kern vollständig trocknen.

Kissenbezug

Maschinenwäsche: Der Bezug kann bei 60°C in der Waschmaschine gewaschen werden. Trocknen Sie die den Bezug im Anschluss an der Luft oder niedriger Stufe im Wäschetrockner.