

WIEDEREINSATZ / PATIENTENWECHSEL

Ein Wiedereinsatz der Kissen ist grundsätzlich möglich. Voraussetzung hierfür ist eine sach- und fachgerechte Reinigung und Desinfektion (*hygienische Aufbereitung nach dem vom RKI gelisteten VDV-Verfahren*) des Kissens und des Bezuges. Eine entsprechende Wiedereinsatzreinigung entsprechend den Anforderungen des MPG wird von uns derzeit nicht angeboten.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter:

Tel.: +49 (0) 7181-475 060 oder per E-Mail an info@kubivent.com.

SICHERE ENTSORGUNG

Das Kissen ist fachgerecht auf dem Sperrmüll oder einem Wertstoffhof zu entsorgen. Das Produkt hat keine physikalischen oder mikrobiologischen Gefahrenpotentiale, die bei der Entsorgung beachtet werden müssen.

SICHERHEITSHINWEIS

Das Rauchen und Anwenden einer Flammquelle in unmittelbarer Nähe sollte vermieden werden.

LIEFERUMFANG

ConturaLight Kissen mit Inkontinenzschutzbezug
1x ConturaLight 8 cm (Kissenkern)
1x Inkontinenzschutzbezug (abnehmbar)
1x Gebrauchsanleitung
1x Kartonverpackung

KONSULTATION EINES ANGEHÖRIGEN
DER GESUNDHEITSBERUFE, MELDEPFLICHT

Wenn Ihnen die Anwendung des Produktes nicht geläufig ist und Sie beim Einsatz Hilfestellung benötigen, steht Ihnen unser Fachpersonal gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne.

Bei allergischen Reaktionen auf der Haut konsultieren Sie einen Arzt. Bitte beachten Sie, dass alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden sind. Schwerwiegende Vorfälle im Sinne des Gesetzes sind alle unerwünschten Ereignisse, die eine der nachstehenden Folgen hatten: Tod, lebensbedrohliche Erkrankung oder Verletzung, bleibende Körperschäden, chronische Erkrankungen oder fötale Gefährdung.

WARTUNG DURCH DEN ANWENDER

Grundsätzlich muss keine Wartung durch den Anwender durchgeführt werden.

HERSTELLUNG UND VERTRIEB



KUBIVENT ConturaLight Kissen werden ausschließlich von der Firma KUBIVENT Sitz- und Liegepolster GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben.

Die Sitzkissen sind Medizinprodukte der Klasse I und als solche CE-gekennzeichnet.



ANTI-DEKUBITUS-KISSEN

Gebrauchsanleitung
KUBIVENT ConturaLight

Kaltschaumkissen mit unterteilter Sitzfläche

Therapie und
Prophylaxe

Nach Braden Skala
allgemein - hoch

EINSATZBEREICHE UND ZWECKBESTIMMUNG

Das **KUBIVENT ConturaLight** Kissen unterstützt bei entsprechenden pflegerischen Maßnahmen die Prophylaxe und Therapie,

- bei bereits bestehenden Dekubiti (*bis zum Dekubitus-Stadium III*) und
- bei Personen, die durch dauerhaftes Sitzen aufgrund von Krankheit oder Behinderung ein allgemeines bis hohes Dekubitus-Risiko (*nach Braden*) haben.

Aufgrund seiner speziellen Eigenschaften empfiehlt sich der Einsatz des Kissens besonders bei Patienten,

- bei denen die Sitzhaltung stabilisiert werden muss,
- bei denen eine gute Druckverteilung und Anpassung an die Körperform erforderlich ist,
- bei denen der Sitzbeinhöcker entlastet werden muss,
- mit teilweiser oder vollständiger Lähmung einer Körperhälfte,
- mit gestörter Wahrnehmung der unteren Gliedmaßen und
- mit beeinträchtigtem Allgemeinzustand.

Grundsätzlich sollte der Einsatz der Kissen von geschultem Fachpersonal eingeschätzt werden. Die Kissen sind für den Einsatz im Rollstuhl oder sonstigen Sitzgelegenheiten als vollständiges Sitzkissen konzipiert.

INDIKATIONEN UND ZU ERWARTENDER KLINISCHER NUTZEN

Das Kissen dient bei Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (*durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung*) mit drohender oder manifester Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (*Dekubitus/Druckgeschwür*) am Gesäß, wenn die Person noch in der Lage sind, z. B. auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen, zur Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses.¹⁾

ANWENDUNGSRISIKEN UND KONTRAINDIKATIONEN

Allergien

Das Kissen darf nicht bei bestehenden Schaumstoffallergien eingesetzt werden.

Inkontinenz

Das Kissen ist standardmäßig mit einem geschlossenen Inkontinenzschutzbezug ausgestattet.

Gewichtsbeschränkungen

Durch Überschreiten der angegebenen Gewichtsbeschränkungen der Kissen bei zu schweren Patienten kann das Kissen durchgesessen werden.

Höhe/Ausführung	8 cm Volllinkobezug
Einsatzbereich	bis 120 kg
Empfohlen	0-90 kg

SACHGERECHTE ANWENDUNG


Das Kissen ist für den Einsatz im Rollstuhl, auf Sesseln oder Stühlen geeignet. Beim Einsatz der Kissen ist immer auch die Höhe des Kissens zu beachten und auf die jeweilige Sitzgelegenheit abzustimmen (*ggf. z. B. Anpassung der Armstützen des Rollstuhls*).

Das Kissen besteht aus einem hochwertigen Kaltschaum mit unterteilter Sitzfläche. Das Kissen wird mit der konturgeschnittenen Sitzfläche nach oben positioniert. Die Hinterseite des Schaumstoffkerns ist gekennzeichnet. Das **KUBIVENT**-Logo Etikett am Bezug weist dabei nach vorne und der Reißverschluss nach unten und hinten.

¹⁾ Hinweis aus dem Hilfsmittelverzeichnis.

TECHNISCHE DATEN

Querschnitt des **ConturaLight** 8 cm

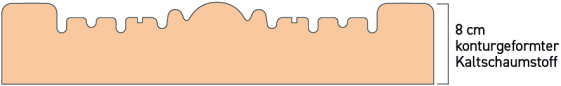

Schematische, technische Illustration eines Kissen-Ausschnitts

Kissengrößen und Gewichte							
HMV-Nr. mit Vollinkontinenzschutzbezug: 11.39.01.2021							
Artikel-Nr.	Größe Breite x Tiefe x Höhe	Gewicht	Artikel-Nr. Ersatzbezug	Artikel-Nr.	Größe Breite x Tiefe x Höhe	Gewicht	Artikel-Nr. Ersatzbezug
CONL38408-I	38 x 40 x 8 cm	0,6 kg	BCONI38408	CONL46518-I	46 x 51 x 8 cm	1,0 kg	BCONI46518
CONL40428-I	40 x 42 x 8 cm	0,6 kg	BCONI40428	CONL48428-I	48 x 42 x 8 cm	0,7 kg	BCONI48428
CONL42428-I	42 x 42 x 8 cm	0,7 kg	BCONI42428	CONL48458-I	48 x 45 x 8 cm	0,9 kg	BCONI48458
CONL42458-I	42 x 45 x 8 cm	0,7 kg	BCONI42458	CONL50458-I	50 x 45 x 8 cm	0,9 kg	BCONI50458
CONL42488-I	42 x 48 x 8 cm	0,7 kg	BCONI42488	CONL50508-I	50 x 50 x 8 cm	1,2 kg	BCONI50508
CONL42508-I	42 x 50 x 8 cm	0,8 kg	BCONI42508	CONL51438-I	51 x 43 x 8 cm	1 kg	BCONI51438
CONL45428-I	45 x 42 x 8 cm	0,8 kg	BCONI45428	CONL56468-I	56 x 46 x 8 cm	1,3 kg	BCONI56468
CONL45458-I	45 x 45 x 8 cm	0,8 kg	BCONI45458				
CONL46488-I	46 x 48 x 8 cm	1,0 kg	BCONI46488				

Verwendete Materialien für Kissen und Bezüge	
	8 cm
Kissenkern	Kaltschaumstoff: Raumgewicht 50 kg/m³ mit einer Stauchhärte von 5,0 kPa
Bezug	Inkontinenzschutzbezug aus PU-beschichtetem PES-Gewirke mit rutschhemmender Beschichtung an der Unterseite

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Komponenten stellt Hygiene und Langlebigkeit der Kissen sicher. Zu beachten sind die nachfolgenden Hinweise und das entsprechende Waschetikett am Bezug. Grundsätzlich sind alle haushaltsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Reinigung und Desinfektion unserer Produkte geeignet. Wir empfehlen die Verwendung milder, handelsüblicher Reinigungsmittel sowie VAH-gelisteter und materialverträglicher Flächendesinfektionsmittel, insbesondere alkoholbasierter Mittel (*z. B. Bacillol AF, Meliseptol® pure*). Bei der Auswahl des Reinigungs- und Desinfektionsmittels ist zu beachten, dass kein Äthylenoxid, kein Formaldehyd und keine Phenole verwendet werden. Verwenden Sie auch keine Scheuermittel oder Mittel, die ätzende Substanzen, Säuren oder Bleiche enthalten, und keine Mittel auf Basis von Chlor, Aceton oder Benzol. Beachten Sie vor dem Einsatz die Sicherheits- und Anwendungshinweise des Reinigungs- und Desinfektionsmittelherstellers. Dosieren Sie das Mittel nach dem Dosierplan, welcher auf dem Etikett oder in der Packungsbeilage des Herstellers angegeben ist.

Kissenkern

Der Kissenkern ist für die Reinigung in der Waschmaschine nicht geeignet. Der Kissenkern kann mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einem milden, haushaltsüblichen Reinigungs-/Desinfektionsmittel abgewischt werden. Vor dem Einsatz sollte der Kern vollständig trocknen.

Kissenbezug

Maschinenwäsche: Der Bezug kann bei 60°C in der Waschmaschine gewaschen werden. Trocknen Sie die den Bezug im Anschluss an der Luft oder niedriger Stufe im Wäschetrockner.

Desinfektion: Tragen Sie das Mittel mit einem Desinfektionstuch oder einer Sprühflasche gleichmäßig auf die Oberfläche auf. Lassen Sie das Produkt vollständig an der Luft trocknen. Nicht mit Wasser nachwischen. Alternativ kann die Desinfektion mit einem Desinfektionsvollwaschmittel in der Waschmaschine erfolgen.

Ausführliche Informationen zur Reinigung und Desinfektion finden Sie unter kubivent.com.