

Matratzenkern
Der Matratzenkern ist für die Reinigung in der Waschmaschine nicht geeignet.
Der Matratzenkern kann mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einem milden, haushaltsüblichen Reinigungs-/Desinfektionsmittel abgewischt werden. Vor dem Einsatz sollte der Kern vollständig trocknen.

Bezüge
Maschinenwäsche: Der Bezug kann bei 60 °C in der Waschmaschine gewaschen werden. Trocknen Sie die den Bezug im Anschluss an der Luft oder niedriger Stufe im Wäschetrockner.

Desinfektion: Tragen Sie das Mittel mit einem Desinfektionstuch oder einer Sprühflasche gleichmäßig auf die Oberfläche auf. Lassen Sie das Produkt vollständig an der Luft trocknen. Nicht mit Wasser nachwischen.
Alternativ kann die Desinfektion mit einem Desinfektionsvollwaschmittel in der Waschmaschine erfolgen.

Ausführliche Informationen zur Reinigung und Desinfektion finden Sie unter kubivent.com.

WIEDEREINSATZ / PATIENTENWECHSEL

Der Wiedereinsatz der Matratze bei anderen Personen ist nicht vorgesehen.

SICHERE ENTSORGUNG

Die Matratze ist fachgerecht auf dem Sperrmüll oder einem Wertstoffhof zu entsorgen. Das Produkt hat keine physikalischen oder mikrobiologischen Gefahrenpotentiale, die bei der Entsorgung beachtet werden müssen.

LIEFERUMFANG

Standard-Pflegematratzen mit Trikotbezug	Standard-Pflegematratzen mit Polyesterbezug
1x Standardmatratze (Matratzenkern)	1x Standardmatratze (Matratzenkern)
1x Trikotbezug (abnehmbar)	1x Polyesterbezug (abnehmbar)
1x Gebrauchsanleitung	1x Gebrauchsanleitung
1x Folienverpackung	1x Folienverpackung

SICHERHEITSHINWEISE

Das Rauchen und Anwenden einer Flammquelle in unmittelbarer Nähe sollte vermieden werden.

KONSULTATION EINES ANGEHÖRIGEN DER GESUNDHEITSBERUFE, MELDEPFLICHT

Wenn Ihnen die Anwendung des Produktes nicht geläufig sein sollte und Sie beim Einsatz Hilfestellung benötigen, steht Ihnen unser Fachpersonal für Rückfragen gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne. Bei allergischen Reaktionen auf der Haut konsultieren Sie einen Arzt. Bitte beachten Sie, dass alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden sind. Schwerwiegende Vorfälle im Sinne des Gesetzes sind alle unerwünschten Ereignisse, die eine der nachstehenden Folgen hatten: Tod, lebensbedrohliche Erkrankung oder Verletzung, bleibende Körperschäden, chronische Erkrankungen oder fötale Gefährdung.

WARTUNG DURCH DEN ANWENDER

Grundsätzlich muss keine Wartung durch den Anwender durchgeführt werden.

HERSTELLUNG UND VERTRIEB

CE **KUBIVENT** Standard-Pflegematratzen werden ausschließlich von der Firma **KUBIVENT** Sitz- und Liegepolster GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben.

Die Matratzen sind Medizinprodukte der Klasse I und als solche CE-gekennzeichnet.



STANDARD-PFLEGEMATRATZEN

Gebrauchsanleitung KUBIVENT Standard-Pflegematratzen

PU-Schaummatratzen

Änderungen vorbehalten · Stand 06/2026 · AGB siehe kubivent.com



EINSATZBEREICHE UND ZWECKBESTIMMUNG

Die **KUBIVENT Standard**-Pflegematratze ist für den Einsatz bei Personen, die aufgrund von Krankheit oder Handicap, dauerhaft oder vorwiegend bettlägrig sind und ein Pflegebett benötigen. Sie ist geeignet für den Einsatz im Klinik- und Privatbereich als Ausstattung handelsüblicher Pflegebetten.

Grundsätzlich sollte der Einsatz der Matratze individuell von geschultem Fachpersonal eingeschätzt werden.

INDIKATIONEN UND ZU ERWARTENDER KLINISCHER NUTZEN

Die Matratze unterstützt eine angenehme und weiche Lagerung des Anwenders. Der verwendete PU-Schaumstoff ermöglicht eine gute Anpassung an die Körperform und die jeweilige Liegeposition. Dies bildet die Grundlage für eine gute Druckverteilung.

VERWENDUNG DER MATRATZE IN BETTEN MIT VERSTELLBARER LIEGEFLÄCHE

Beim Verstellen der Liegefläche können Körperteile oder Gegenstände zwischen Matratze und Bettmechanik eingeklemmt werden. Stellen Sie sicher, dass keine Körperteile oder Objekte im Spaltbereich liegen. Bei starker Verstellung bzw. in extremen Winkelbereichen können der Liegekomfort oder therapeutische Eigenschaften (z. B. *Druckentlastung*) beeinträchtigt werden.

EINSATZ DER MATRATZE IN BETTEN MIT SEITENGITTERN

Aufgrund der Matratzenhöhe von 10 bzw. 12 cm sind beim Einsatz der handelsüblichen Seitengitter keine Einschränkungen vorhanden. Der Mindestabstand von 22 cm zwischen Oberkante Matratze und Oberkante Seitengitter ist zu beachten. Empfehlenswert ist der Einsatz von sogenannten Seitengitterpolstern, um ein Einklemmen in den Seitengittern zu vermeiden.

ANWENDUNGSRISIKEN UND KONTRAINDIKATIONEN

Allergien

Die Matratzen dürfen nicht bei bestehenden Schaumstoffallergien eingesetzt werden.

Inkontinenz

Bei vorliegender Inkontinenz sollte ein passender Inkontinenzschutzbezug verwendet werden. Diese werden als Zubehör angeboten.

Dekubitus

Für Dekubitus-Therapie und -Prophylaxe empfehlen wir den Einsatz unserer Anti-Dekubitus-Matratzen.

Gewichtsbeschränkungen

Durch Überschreiten der angegebenen Gewichtsbeschränkungen der Matratze bei zu schweren Patienten kann die Matratze durchgelegen werden.

Höhe/Ausführung	10 cm	12 cm
Einsatzbereich	0-100 kg	0-120 kg
Empfohlen	0-80 kg	0-100 kg

SACHGERECHTE ANWENDUNG

Die Matratze ist für den Einsatz im Pflegebett oder auch handelsüblichen Betten geeignet. Sie muss in Länge und Breite den Innenmaßen des Bettrahmens entsprechen. Die Oberseite der Matratze ist an der 4 cm PU-Schaumschicht erkennbar, siehe technische Illustration. Matratzen von Typ RG40 können frei ins Bett eingelegt werden.


TECHNISCHE DATEN

Querschnitt der RG40
Standard-Pflegematratze 10 bzw. 12 cm



Schematische, technische Illustration eines Matratzen-Ausschnitts

Längsschnitt der RG35
Standard-Pflegematratze 10 bzw. 12 cm

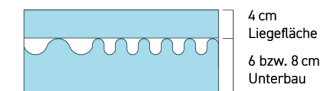

Matratzengrößen und Gewichte					
Höhe 10/12 cm	RG35 mit Trikotbezug		RG40 mit Trikotbezug		schwer entzündbar
Größe	Bestell-Nr.	Gewicht	Bestell-Nr.	Gewicht	Bestell-Nr.
190 x 90 x 10 cm	SM102-35Z	5,3 kg	SM102-40Z	7,2 kg	-SW
190 x 90 x 12 cm	SM102-35	6,5 kg	SM102-40	8,5 kg	-SW
200 x 90 x 10 cm	SM103-35Z	5,7 kg	SM103-40Z	7,6 kg	-SW
200 x 90 x 12 cm	SM103-35	6,9 kg	SM103-40	9,0 kg	-SW
200 x 100 x 10 cm	SM104-35Z	6,4 kg	SM104-40Z	8,4 kg	-SW
200 x 100 x 12 cm	SM104-35	7,8 kg	SM104-40	10,0 kg	-SW

Höhe 10/12 cm	RG 35 mit Polyesterbezug		RG40 mit Polyesterbezug		schwer entzündbar
Größe	Bestell-Nr.	Gewicht	Bestell-Nr.	Gewicht	Bestell-Nr.
190 x 90 x 10 cm	SM102-35ZSC	5,1 kg	SM102-40ZSC	7,0 kg	-SWSC
190 x 90 x 12 cm	SM102-35SC	6,3 kg	SM102-40SC	8,3 kg	-SWSC
200 x 90 x 10 cm	SM103-35ZSC	5,5 kg	SM103-40ZSC	7,4 kg	-SWSC
200 x 90 x 12 cm	SM103-35SC	6,7 kg	SM103-40SC	8,8 kg	-SWSC
200 x 100 x 10 cm	SM104-35ZSC	6,2 kg	SM104-40ZSC	8,2 kg	-SWSC
200 x 100 x 12 cm	SM104-35SC	7,6 kg	SM104-40SC	9,8 kg	-SWSC

Verwendete Materialien für Matratzen und Bezüge Matratzenkern RG35	
Liegefläche	PU-Schaum: Raumgewicht 35 kg/m³, Stauchhärte 4,2 kPa
Unterbau	PU-Schaum: Raumgewicht 35 kg/m³, Stauchhärte 4,2 kPa
Trikotbezug, Polyesterbezug	100 % Polyester
Schwer entzündbar nach DIN 597 1/2	

Verwendete Materialien für Matratzen und Bezüge Matratzenkern RG40	
Matratzenkern:	PU-Schaum: Raumgewicht 40 kg/m³, Stauchhärte 4,5 kPa
Trikotbezug, Polyesterbezug	100 % Polyester
Schwer entzündbar nach DIN 597 1/2	

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Komponenten stellt Hygiene und Langlebigkeit der Matratze sicher. Zu beachten sind die nachfolgenden Hinweise und das entsprechende Waschetikett am Bezug. Grundsätzlich sind alle haushaltsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Reinigung und Desinfektion unserer Produkte geeignet. Wir empfehlen die Verwendung milder, handelsüblicher Reinigungsmittel sowie VAH-gelisteter und materialverträglicher Flächendesinfektionsmittel, insbesondere alkoholbasierter Mittel (z. B. *Bacillol AF*, *Meliseptol® pure*).

Bei der Auswahl des Reinigungs- und Desinfektionsmittels ist zu beachten, dass kein Äthylenoxid, kein Formaldehyd und keine Phenole verwendet werden. Verwenden Sie auch keine Scheuermittel oder Mittel, die ätzende Substanzen, Säuren oder Bleiche enthalten, und keine Mittel auf Basis von Chlor, Aceton oder Benzol. Beachten Sie vor dem Einsatz die Sicherheits- und Anwendungshinweise des Reinigungs- und Desinfektionsmittelherstellers. Dosieren Sie das Mittel nach dem Dosierplan, welcher auf dem Etikett oder in der Packungsbeilage des Herstellers angegeben ist.