

WIEDEREINSATZ / PATIENTENWECHSEL

Der **KUBIVENT Fersenschuh** ist als Mehrpersonenprodukt ausgelegt. Ein Wiedereinsatz ist ausschließlich im institutionellen bzw. klinischen Bereich nach fachgerechter Aufbereitung zulässig. Vor einer erneuten Anwendung ist das Produkt nach den KRINKO-Empfehlungen und den Anforderungen des § 8 MPBetreibV fachgerecht aufzubereiten.

Im Rahmen der patientenindividuellen Versorgung (z.B. *Abgabe auf ärztliche Verordnung*) ist der Wiedereinsatz des **KUBIVENT Fersenschuhs** bei anderen Personen nicht vorgesehen.

SICHERE ENTSORGUNG

Der **PurplePos Fersenschuh** ist fachgerecht auf dem Sperrmüll oder einem Wertstoffhof zu entsorgen. Das Produkt hat keine physikalischen oder mikrobiologischen Gefahrenpotentiale, die bei der Entsorgung beachtet werden müssen.

SICHERHEITSHINWEIS

Das Rauchen und Anwenden einer Flamquelle in unmittelbarer Nähe sollte vermieden werden.

LIEFERUMFANG

PurplePos Fersenschuh
1x PurplePos Fersenschuh
1x Gebrauchsanleitung
1x Folienverpackung

KONSULTATION EINES ANGEHÖRIGEN
DER GESUNDHEITSBERUFE, MELDEPFLICHT

Wenn Ihnen die Anwendung des Produktes nicht geläufig ist und Sie beim Einsatz Hilfestellung benötigen, steht Ihnen unser Fachpersonal gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne.

Bei allergischen Reaktionen auf der Haut konsultieren Sie einen Arzt. Bitte beachten Sie, dass alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden sind. Schwerwiegende Vorfälle im Sinne des Gesetzes sind alle unerwünschten Ereignisse, die eine der nachstehenden Folgen hatten: Tod, lebensbedrohliche Erkrankung oder Verletzung, bleibende Körperschäden, chronische Erkrankungen oder fötale Gefährdung.

WARTUNG DURCH DEN ANWENDER

Grundsätzlich muss keine Wartung durch den Anwender durchgeführt werden.

HERSTELLUNG UND VERTRIEB



KUBIVENT PurplePos Fersenschuhe werden ausschließlich von der Firma Kubivent Sitz- und Liegepolster GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben.

Die **KUBIVENT PurplePos Fersenschuhe** sind Medizinprodukte der Klasse I und als solche CE-gekennzeichnet.



PurplePos Positionierungskissen

Gebrauchsanleitung KUBIVENT PurplePos Fersenschuh

Fersenschuh mit Mikroperlenfüllung

EINSATZBEREICHE UND ZWECKBESTIMMUNG

Der **KUBIVENT PurplePos Fersenschuh** nterstützt im Rahmen eines ganzheitlichen Pflege- und Behandlungskonzeptes die Prophylaxe und Therapie bei Personen,

- mit bereits bestehenden Dekubiti und
- die durch dauerhaftes Liegen aufgrund von Krankheit oder Behinderung ein niedriges, mittleres und hohes Dekubitusrisiko (*Braden-Skala*) haben.

Aufgrund seiner speziellen Eigenschaften empfiehlt sich der Einsatz des Fersenschuhs besonders bei Patienten,

- bei denen die Ferse gezielt entlastet werden soll,
- bei denen die Ferse frei gelagert werden muss,
- bei denen eine gute Druckverteilung im Bereich der Ferse erforderlich ist und
- bei denen die Knöchel entlastet werden müssen (*Seitenlage*).

Grundsätzlich sollte der Einsatz des Fersenschuhs individuell von geschultem Fachpersonal eingeschätzt werden.

INDIKATIONEN UND ZU ERWARTENDER KLINISCHER NUTZEN

Der Fersenschuh dient bei Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (*durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung*) mit drohender und manifester Druckschädigung der Haut und Unterhaut (*Dekubitus/Druckgeschwür*) an den Extremitäten, wenn eine Lagerung der Extremität ohne Unterstützung nicht möglich ist, zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses. Produkte zur Freilagerung können aufgrund der Gefahr eines Fensterödems meist nur kurzzeitig eingesetzt werden und bedürfen daher einer besonders sorgfältigen Indikationsstellung und Verlaufsbeobachtung.¹⁾

ANWENDUNGSRISIKEN UND KONTRAINDIKATIONEN

Der Fersenschuh ist nicht für das Gehen geeignet. Beim Gehen mit dem Fersenschuh besteht ein erhöhtes Sturz- und Verletzungsrisiko.

Personen die stark schwitzen, sollten direkten Hautkontakt mit dem Inkontinenzschutzbezug, beispielsweise durch das Tragen von Baumwollsocken, vermeiden. Um Feuchtigkeitsstau zu vermeiden, wird das Tragen von Socken empfohlen.

Vor dem Transfer vom/aus dem Bett in den Rollstuhl sollte der Fersenschuh vom Fuß entfernt und erst nach dem sicheren Transfer wieder eingesetzt werden.

VERWENDUNG DES PRODUKTES IN BETTEN MIT VERSTELLBARER LIEGEFLÄCHE

Der **KUBIVENT PurplePos Fersenschuh** ist uneingeschränkt in Betten mit verstellbarer Liegefläche einsetzbar.

SACHGERECHTE ANWENDUNG

Der **KUBIVENT PurplePos Fersenschuh** wird für die im pflegerischen Bereich üblichen Positionsunterstützung eingesetzt. Dabei ist ein ärztlich/pflegerisch abgestimmter Behandlungs- und Versorgungsprozess notwendig.

Zur Freilagerung der Ferse wird der Fuß mit dem Fersenbein nach hinten in den Fersenschuh eingelegt. Das umlaufende schwarze Nahtband zeigt die für die Fußsohle vorgesehene Seite. Das Loch auf der Rückseite wird zur Freilagerung der Ferse im Bereich des kranialen Fersensporn ausgerichtet.

Die Lasche mit dem variablen Klettverschluss wird fest über den Spann fixiert, wodurch ein Verrutschen des Fersenschuhs verhindert wird. Die Füllung kann durch kreisende Handbewegungen verteilt werden, um eine optimale Anpassung an den Fuß zu gewährleisten. In Betten mit Seitengittern muss durch die korrekte Positionierung Verletzungen durch Einklemmen oder Herausfallen vorgebeugt werden.

¹⁾ Hinweis aus dem Hilfsmittelverzeichnis.

Freilagerung der Ferse



Schematische Illustration eines Fersenschuhs.
Bitte beachten Sie die Anwendungsrisiken und Kontraindikationen (S.1).

TECHNISCHE DATEN

PurplePos Fersenschuh



Schematische Illustration eines Fersenschuhs

HMF-Nr.: 11.11.05.0030 PZN: 18714993		
Größen und Gewichte		
Artikel-Nr.	Größe Breite x Tiefe x Höhe	Gewicht
PKFS	25 x 24 x 14 cm	150 g

Verwendete Materialien	
Außen	vollvernähtes PU-beschichtetes Polyestergerewe
Innen	vollvernähtes Polyestergerewe mit EPS-Mikroperlenfüllung

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion stellt Hygiene und Langlebigkeit des Fersenschuhs sicher. Zu beachten sind die nachfolgenden Hinweise und das entsprechende Waschetikett am Bezug. Grundsätzlich sind alle haushaltsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Reinigung und Desinfektion unserer Produkte geeignet. Wir empfehlen die Verwendung milder, handelsüblicher Reinigungsmittel sowie VAH-gelisteter und materialverträglicher Flächendesinfektionsmittel, insbesondere alkoholbasierter Mittel (z. B. *Bacillol AF*, *Meliseptol® pure*). Bei der Auswahl des Reinigungs- und Desinfektionsmittels ist zu beachten, dass kein Äthylenoxid, kein Formaldehyd und keine Phenole verwendet werden. Verwenden Sie auch keine Scheuermittel oder Mittel, die ätzende Substanzen, Säuren oder Bleiche enthalten, und keine Mittel auf Basis von Chlor, Aceton oder Benzol. Beachten Sie vor dem Einsatz die Sicherheits- und Anwendungshinweise des Reinigungs- und Desinfektionsmittelherstellers. Dosieren Sie das Mittel nach dem Dosierplan, welcher auf dem Etikett oder in der Packungsbeilage des Herstellers angegeben ist.

PurplePos Fersenschuh

Der **PurplePos Fersenschuh** kann mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einem milden, haushaltsüblichen Reinigungs-/Desinfektionsmittel abgewischt werden. Vor dem Einsatz sollte der Fersenschuh vollständig trocknen.

Maschinenwäsche:

Der Fersenschuh kann bei 60 °C in der Waschmaschine gewaschen werden. Trocknen Sie den Fersenschuh im Anschluss an der Luft.

Desinfektion:

Tragen Sie das Mittel mit einem Desinfektionstuch oder einer Sprühflasche gleichmäßig auf die Oberfläche auf. Lassen Sie das Produkt vollständig an der Luft trocknen. Nicht mit Wasser nachwischen. Alternativ kann die Desinfektion mit einem Desinfektionsvollwaschmittel in der Waschmaschine erfolgen.