

WIEDEREINSATZ / PATIENTENWECHSEL

Der Wiedereinsatz der Matratze bei anderen Personen ist nicht vorgesehen.

SICHERE ENTSORGUNG

Die Matratze ist fachgerecht auf dem Sperrmüll oder einem Wertstoffhof zu entsorgen. Das Produkt hat keine physikalischen oder mikrobiologischen Gefahrenpotentiale, die bei der Entsorgung beachtet werden müssen.

LIEFERUMFANG

Compact DuoCare 15/18/21 cm Schwerlastmatratze inkl. Trikotbezug
1x Compact DuoCare Schwerlastmatratze (Matratzenkern)
1x Trikotbezug (abnehmbar)
1x Gebrauchsanleitung
1x Kartonverpackung

SICHERHEITSHINWEISE

Das Rauchen und Anwenden einer Flammquelle in unmittelbarer Nähe sollte vermieden werden.

KONSULTATION EINES ANGEHÖRIGEN
DER GESUNDHEITSBERUFE, MELDEPFLICHT

Wenn Ihnen die Anwendung des Produktes nicht geläufig sein sollte und Sie beim Einsatz Hilfestellung benötigen, steht Ihnen unser Fachpersonal für Rückfragen gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne.

Bei allergischen Reaktionen auf der Haut konsultieren Sie einen Arzt. Bitte beachten Sie, dass alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden sind. Schwerwiegende Vorfälle im Sinne des Gesetzes sind alle unerwünschten Ereignisse, die eine der nachstehenden Folgen hatten: Tod, lebensbedrohliche Erkrankung oder Verletzung, bleibende Körperschäden, chronische Erkrankungen oder fötale Gefährdung.

WARTUNG DURCH DEN ANWENDER

Grundsätzlich muss keine Wartung durch den Anwender durchgeführt werden.

HERSTELLUNG UND VERTRIEB

CE

KUBIVENT Compact DuoCare Schwerlastmatratzen werden ausschließlich von der Firma KUBIVENT Sitz- und Liegepolster GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben.

Die Matratzen sind Medizinprodukte der Klasse I und als solche CE-gekennzeichnet.



STANDARD-PROPHYLAXE-MATRATZEN

Gebrauchsanleitung
KUBIVENT Compact DuoCare
Schwerlastmatratze

PU-Schaum und Kaltschaummatratze mit Längseinschnitten

Änderungen vorbehalten · Stand 05/2026 · AGB siehe kubivent.com



EINSATZBEREICHE UND ZWECKBESTIMMUNG

Die **KUBIVENT Compact DuoCare** Schwerlastmatratze unterstützt im Rahmen eines ganzheitlichen Pflege- und Behandlungskonzeptes die Dekubitus-Prophylaxe bei adipösen Personen, die aufgrund von Krankheit oder Handicap dauerhaft oder überwiegend bettlägrig sind und ein Pflegebett benötigen. Sie ist geeignet für den Einsatz im Klinik- und Privatbereich als Ausstattung handelsüblicher Pflegebetten.

Grundsätzlich sollte der Einsatz der Matratze individuell von geschultem Fachpersonal eingeschätzt werden.

INDIKATIONEN UND ZU ERWARTENDER KLINISCHER NUTZEN

Die Matratze unterstützt eine angenehme und weiche Lagerung des Anwenders. Der verwendete Kaltschaumstoff ermöglicht eine gute Anpassung an die Körperform und die jeweilige Liegeposition. Dies bildet die Grundlage für eine gute Druckverteilung. In Kombination mit den Längseinschnitten werden gleichzeitig Scherkräfte reduziert, die beispielsweise bei Positionswechsel auftreten können. Außerdem ermöglichen die Einschnitte in der Liegefläche eine gute Belüftung und beugen damit dem Wärme- und Feuchtigkeitstau vor.

VERWENDUNG DER MATRATZE IN BETTEN MIT VERSTELLBARER LIEGEFLÄCHE

Beim Verstellen der Liegefläche können Körperteile oder Gegenstände zwischen Matratze und Bettmechanik eingeklemmt werden. Stellen Sie sicher, dass keine Körperteile oder Objekte im Spaltbereich liegen. Bei starker Verstellung bzw. in extremen Winkelbereichen können der Liegekomfort oder therapeutische Eigenschaften (z. B. *Druckentlastung*) beeinträchtigt werden.

EINSATZ DER MATRATZE IN BETTEN MIT SEITENGITTERN

Aufgrund der Matratzenhöhe von 15/18/21 cm ist der Mindestabstand von 22 cm zwischen Oberkante Matratze und Oberkante Seitengitter ist zu beachten. Empfehlenswert ist der Einsatz von sogenannten Seitengitterpolstern, um ein Einklemmen in den Seitengittern zu vermeiden.

ANWENDUNGSRISIKEN UND KONTRAINDIKATIONEN

Allergien

Die Matratzen dürfen nicht bei bestehenden Schaumstoffallergien eingesetzt werden.

Inkontinenz

Bei vorliegender Inkontinenz sollte ein passender Inkontinenzschutzbezug verwendet werden. Diese werden in allen passenden Größen als Zubehör angeboten.

Dekubitus

Für Dekubitus-Therapie und -Prophylaxe empfehlen wir den Einsatz unserer Anti-Dekubitus-Matratzen.

Gewichtsbeschränkungen

Durch Überschreiten der angegebenen Gewichtsbeschränkungen der Matratze bei zu schweren Patienten kann die Matratze durchgelegen werden.


Höhe/Ausführung	15 cm	18 cm	21 cm
Einsatzbereich	0-150 kg	0-200 kg	0-250 kg

SACHGERECHTE ANWENDUNG


Die Matratze ist für den Einsatz im Pflegebett oder auch handelsüblichen Betten geeignet. Sie muss in Länge und Breite den Innenmaßen des Bettrahmens entsprechen. Die Oberseite der Matratze ist an den Längseinschnitten erkennbar, siehe technische Illustration.

TECHNISCHE DATEN


Querschnitt der Compact DuoCare 15 cm

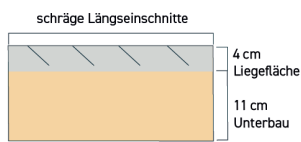

Querschnitt der Compact DuoCare 18 cm

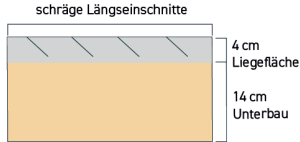

Querschnitt der Compact DuoCare 21 cm

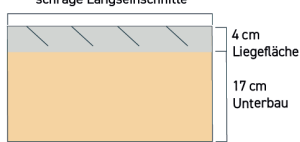

Schematische, technische Illustration eines Matratzen-Ausschnitts

Matratzengrößen und Gewichte						
Größe	In der Höhe 15 cm inkl. Trikotbezug		In der Höhe 18 cm inkl. Trikotbezug		In der Höhe 21 cm inkl. Trikotbezug	
	Bestell-Nr.	Gewicht	Bestell-Nr.	Gewicht	Bestell-Nr.	Gewicht
200 x 90 cm	WM153-BWSW2	13,5 kg	WM183-BWSW2	16,3 kg	WM213-BWSW2	19,0 kg
200 x 100 cm	WM154-BWSW2	15,2 kg	WM184-BWSW2	18,1 kg	WM214-BWSW2	21,1 kg
200 x 120 cm	WM155-BWSW2	18,3 kg	WM185-BWSW2	21,8 kg	WM215-BWSW2	25,3 kg
200 x 140 cm	WM156-BWSW2	21,1 kg	WM186-BWSW2	25,4 kg	WM216-BWSW2	29,5 kg
200 x 160 cm	WM157-BWSW2	23,9 kg	WM187-BWSW2	29,0 kg	WM217-BWSW2	33,7 kg

Verwendete Materialien für Matratzen und Bezüge	
Liegefläche	Kaltschaum, Raumgewicht 40 kg/m³, Stauchhärte 3,0 kPa
Unterbau	PU-Schaum, Raumgewicht 50 kg/m³, Stauchhärte 6,0 kPa
Trikotbezug	100%-Polyester
Schwer entzündbar nach DIN 597 1/2	

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Komponenten stellt Hygiene und Langlebigkeit der Matratze sicher. Zu beachten sind die nachfolgenden Hinweise und das entsprechende Waschetikett am Bezug. Grundsätzlich sind alle haushaltsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Reinigung und Desinfektion unserer Produkte geeignet. Wir empfehlen die Verwendung milder, handelsüblicher Reinigungsmittel sowie VAH-gelisteter und materialverträglicher Flächendesinfektionsmittel, insbesondere alkoholbasierter Mittel (z. B. *Bacillol AF*, *Meliseptol® pure*). Bei der Auswahl des Reinigungs- und Desinfektionsmittels ist zu beachten, dass kein Äthylenoxid, kein Formaldehyd und keine Phenole verwendet werden. Verwenden Sie auch keine Scheuermittel oder Mittel, die ätzende Substanzen, Säuren oder Bleiche enthalten, und keine Mittel auf Basis von Chlor, Aceton oder Benzol. Beachten Sie vor dem Einsatz die Sicherheits- und Anwendungshinweise des Reinigungs- und Desinfektionsmittelherstellers. Dosieren Sie das Mittel nach dem Dosierplan, welcher auf dem Etikett oder in der Packungsbeilage des Herstellers angegeben ist.

Matratzenkern

Der Matratzenkern ist für die Reinigung in der Waschmaschine nicht geeignet. Der Matratzenkern kann mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einem milden, haushaltsüblichen Reinigungs-/ Desinfektionsmittel abgewischt werden. Vor dem Einsatz sollte der Kern vollständig trocknen

Bezüge

Maschinenwäsche: Der Bezug kann bei 60 °C in der Waschmaschine gewaschen werden. Trocknen Sie die den Bezug im Anschluss an der Luft oder niedriger Stufe im Wäschetrockner.

Desinfektion: Tragen Sie das Mittel mit einem Desinfektionstuch oder einer Sprühflasche gleichmäßig auf die Oberfläche auf. Lassen Sie das Produkt vollständig an der Luft trocknen. Nicht mit Wasser nachwischen. Alternativ kann die Desinfektion mit einem Desinfektionsvollwaschmittel in der Waschmaschine erfolgen.

Ausführliche Informationen zur Reinigung und Desinfektion finden Sie unter [kubivent.com](https://www.kubivent.com).