

Kissenbezug

Maschinenwäsche: Der Bezug kann bei 60°C in der Waschmaschine gewaschen werden. Trocknen Sie die den Bezug im Anschluss an der Luft oder niedriger Stufe im Wäschetrockner.

Desinfektion: Tragen Sie das Mittel mit einem Desinfektionstuch oder einer Sprühflasche gleichmäßig auf die Oberfläche auf. Lassen Sie das Produkt vollständig an der Luft trocknen. Nicht mit Wasser nachwischen. Alternativ kann die Desinfektion mit einem Desinfektionsvollwaschmittel in der Waschmaschine erfolgen.

Ausführliche Informationen zur Reinigung und Desinfektion finden Sie unter kubivent.com.

WIEDEREINSATZ / PATIENTENWECHSEL

Ein Wiedereinsatz der Kissen ist grundsätzlich möglich. Voraussetzung hierfür ist eine sach- und fachgerechte Reinigung und Desinfektion (*hygienische Aufbereitung*) der Kissen sowie des Bezuges.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter:
Tel.: +49 (0) 7181-475 060 oder per E-Mail an info@kubivent.com.

SICHERE ENTSORGUNG

Das Kissen ist fachgerecht auf dem Sperrmüll oder einem Wertstoffhof zu entsorgen. Das Produkt hat keine physikalischen oder mikrobiologischen Gefahrenpotentiale, die bei der Entsorgung beachtet werden müssen.

SICHERHEITSHINWEIS

Das Rauchen und Anwenden einer Flammquelle in unmittelbarer Nähe sollte vermieden werden.

LIEFERUMFANG

Decu-P8 Kissen mit Textilbezug	Decu-P12 Kissen mit Textilbezug
1x Decu-P 8 cm (Kissenkern)	1x Decu-P 12 cm (Kissenkern)
1x Textilbezug (abnehmbar)	1x Textilbezug (abnehmbar)
1x Gebrauchsanleitung	1x Gebrauchsanleitung
1x Kartonverpackung	1x Folienverpackung

**KONSULTATION EINES ANGEHÖRIGEN
DER GESUNDHEITSBERUFE, MELDEPFLICHT**

Wenn Ihnen die Anwendung des Produktes nicht geläufig ist und Sie beim Einsatz Hilfestellung benötigen, steht Ihnen unser Fachpersonal gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne.
Bei allergischen Reaktionen auf der Haut konsultieren Sie einen Arzt. Bitte beachten Sie, dass alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden sind. Schwerwiegende Vorfälle im Sinne des Gesetzes sind alle unerwünschten Ereignisse, die eine der nachstehenden Folgen hatten: Tod, lebensbedrohliche Erkrankung oder Verletzung, bleibende Körperschäden, chronische Erkrankungen oder fötale Gefährdung.

WARTUNG DURCH DEN ANWENDER

Grundsätzlich muss keine Wartung durch den Anwender durchgeführt werden.

HERSTELLUNG UND VERTRIEB

KUBIVENT Decu-P Kissen werden ausschließlich von der Firma **KUBIVENT Sitz- und Liegepolster GmbH**, Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben.

Die Sitzkissen sind Medizinprodukte der Klasse I und als solche CE-gekennzeichnet.

**ANTI-DEKUBITUS-KISSEN**

Gebrauchsanleitung KUBIVENT Decu-P

Kissen aus PU-Schaumstoff mit
Sitzbeinhöcker-Entlastungszone



EINSATZBEREICHE UND ZWECKBESTIMMUNG

Das **KUBIVENT Decu-P** Kissen unterstützt im Rahmen eines ganzheitlichen Pflege- und Behandlungskonzeptes die Prophylaxe und Therapie,

- bei bereits bestehenden Dekubiti (*bis Dekubitus-Kategorie III*) und
- bei Personen, die durch dauerhaftes Sitzen aufgrund von Krankheit oder Behinderung ein niedriges, mittleres und hohes Dekubitusrisiko (*Braden-Skala*) haben.

Aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften empfiehlt sich der Einsatz des Kissens besonders bei Personen,

- bei denen eine gute Druckverteilung und Anpassung an die Körperform erforderlich ist,
- bei denen der Sitzbeinhöcker entlastet werden muss und
- mit hohem Körpergewicht (**KUBIVENT Decu-P12 bis 200 kg**).

Grundsätzlich sollte der Einsatz der Kissen individuell von geschultem Fachpersonal eingeschätzt werden. Die Kissen sind für den Einsatz im Rollstuhl oder sonstigen Sitzgelegenheiten als vollständiges Sitzkissen konzipiert.

INDIKATIONEN UND ZU ERWARTENDER KLINISCHER NUTZEN

Das Kissen dient bei Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (*durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung*) mit drohender oder manifester Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (*Dekubitus/Druckgeschwür*) am Gesäß, wenn die Person noch in der Lage sind, z. B. auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen, zur Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses.¹⁾

ANWENDUNGSRISIKEN UND KONTRAINDIKATIONEN

Allergien

Das Kissen darf nicht bei bestehenden Schaumstoffallergien eingesetzt werden.

Inkontinenz

Bei Inkontinenz empfehlen wir einen passenden Inkontinenzschutzbezug. Dieser wird in den passenden Größen als Zubehör angeboten.

Gewichtsbeschränkungen

Durch Überschreiten der angegebenen Gewichtsbeschränkungen der Kissen bei zu schweren Patienten kann das Kissen durchgesessen werden.

Höhe/Ausführung	8 cm	12 cm
Einsatzbereich	0-120 kg	80-200 kg
Empfohlen	0-80 kg ²⁾	80-180 kg
Mikroklima	Klasse ³⁾	
	H (51 %)	H (50 %)
Druckentlastung	bei 80 kg Klasse	H (45 %)
	bei 120 kg Klasse	H (35 %)
Nach Dauerbelastung	Klasse	H (42 %)

SACHGERECHTE ANWENDUNG


Das Kissen ist für den Einsatz im Rollstuhl, auf Sesseln oder Stühlen geeignet. Beim Einsatz der Kissen ist immer auch die Höhe des Kissens zu beachten und auf die jeweilige Sitzgelegenheit abzustimmen (*z. B. Anpassung der Armstützen des Rollstuhls*). Bei der Anwendung muss die Kissengröße der jeweiligen Größe der Sitzgelegenheit entsprechen, insbesondere bei der Verwendung im Rollstuhl. Das Kissen ist ausschließlich in trockener Umgebung einzusetzen und darf nicht in Nassbereichen (*z.B. Dusche*) oder auf Duschstühlen verwendet werden.

¹⁾ Hinweis aus dem Hilfsmittelverzeichnis. ²⁾ Bei schwereren Patienten (*Patienten mit einem Gewicht von über 80 kg*) empfiehlt sich der Einsatz des 12 cm hohen Decu-P12 Kissens. ³⁾ Informationen zur Klassifizierung siehe kubivent.com.

Das Kissen wird so in den Rollstuhl oder auf den Stuhl gelegt, dass die unterteilte Schaumstoffplatte nach unten weist und die gelbe viscoelastische Komfortzone hinten im Gesäßbereich positioniert ist. Das eingnähte **KUBIVENT**-Logo weist dabei nach vorne. Die Unterseite des Bezugs ist an dem rutschhemmenden **Anti-Slip**-Streifen zu erkennen.


TECHNISCHE DATEN

Querschnitt des Decu-P 8 cm

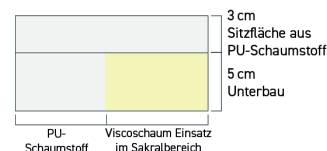

Schematische, technische Illustration eines Kissens-Ausschnitts

Querschnitt des Decu-P 12 cm

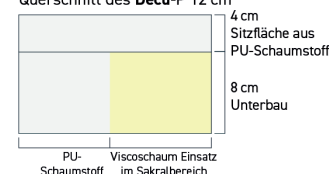

Kissengrößen und Gewichte						Verwendete Materialien für Kissen und Bezüge		
HMV-Nr.: 8 cm 11.39.01.1026			HMV-Nr.: 12 cm 11.39.01.1027				8 cm	12 cm
Größe	Artikel-Nr.	Gewicht	Größe	Artikel-Nr.	Gewicht	Kissenkern	Sitzfläche: PU-Schaumstoff: Raumgewicht 40 kg/m³, Stauchhärte: 4,5 kPa	
35 x 35 x 8 cm	P81	0,9 kg	45 x 50 x 12 cm	P126-L	1,7 kg		Unterbau: PU-Schaumstoff: Raumgewicht 40 kg/m³, Stauchhärte: 4,5 kPa Viscoelastischer Schaumstoff: Raumgewicht 50 kg/m³, Stauchhärte: 3,0 kPa	
35 x 40 x 8 cm	P82-L	1,0 kg	50 x 45 x 12 cm	P126	1,7 kg			
40 x 35 x 8 cm	P82	1,0 kg	50 x 50 x 12 cm	P217	1,8 kg			
35 x 40 x 8 cm	P811-L	1,1 kg	55 x 45 x 12 cm	P1212	1,8 kg			
45 x 35 x 8 cm	P811	1,1 kg	60 x 45 x 12 cm	P1213	1,9 kg	Textilbezug	Obermaterial: 100 % Polyester Anti-Slip: 100 % Polyester - PVC-beschichtet	
40 x 40 x 8 cm	P83	1,1 kg	60 x 50 x 12 cm	P1214	2,0 kg			
40 x 45 x 8 cm	P84-L	1,2 kg	65 x 50 x 12 cm	P1215	2,0 kg			
45 x 40 x 8 cm	P84	1,2 kg	70 x 50 x 12 cm	P1216	2,5 kg			
45 x 45 x 8 cm	P85	1,4 kg	80 x 50 x 12 cm	P1217	3,0 kg			
45 x 50 x 8 cm	P86-L	1,6 kg	90 x 50 x 12 cm	P1218	3,5 kg			
50 x 45 x 8 cm	P86	1,6 kg	100 x 50 x 12 cm	P1219	3,8 kg			
50 x 50 x 8 cm	P87	1,7 kg						

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Komponenten stellt Hygiene und Langlebigkeit der Kissen sicher. Zu beachten sind die nachfolgenden Hinweise und das entsprechende Waschetikett am Bezug. Grundsätzlich sind alle haushaltsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Reinigung und Desinfektion unserer Produkte geeignet. Wir empfehlen die Verwendung milder, handelsüblicher Reinigungsmittel sowie VAH-gelisteter und materialverträglicher Flächendesinfektionsmittel, insbesondere alkoholbasierter Mittel (*z. B. Bacillol AF, Meliseptal® pure*). Bei der Auswahl des Reinigungs- und Desinfektionsmittels ist zu beachten, dass kein Äthylenoxid, kein Formaldehyd und keine Phenole verwendet werden. Verwenden Sie auch keine Scheuermittel oder Mittel, die ätzende Substanzen, Säuren oder Bleiche enthalten, und keine Mittel auf Basis von Chlor, Aceton oder Benzol. Beachten Sie vor dem Einsatz die Sicherheits- und Anwendungshinweise des Reinigungs- und Desinfektionsmittelherstellers. Dosieren Sie das Mittel nach dem Dosierplan, welcher auf dem Etikett oder in der Packungsbeilage des Herstellers angegeben ist.

Kissenkern

Der Kissenkern ist für die Reinigung in der Waschmaschine nicht geeignet. Der Kissenkern kann mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einem milden, haushaltsüblichen Reinigungs-/Desinfektionsmittel abgewischt werden. Vor dem Einsatz sollte der Kern vollständig trocknen.