



Leitfaden für professionell Pflegende

Mobilisation und Positionierung

Alles Wichtige auf einen Blick für
die Pflegepraxis.





Liebe professionell Pflegende,

Mobilität bedeutet mehr als Bewegung. Sie steht für **Selbstbestimmung, Lebensqualität** und **Teilhabe** – besonders bei Menschen mit Pflegebedarf. Die Fähigkeit, sich möglichst eigenständig zu bewegen, ist ein zentrales Bedürfnis, das es zu erhalten und zu fördern gilt.

Pflege, die bewegt

Mobilitätsfördernde und **positionsunterstützende Maßnahmen** sind täglicher Bestandteil pflegerischen Handelns. Sie **tragen wesentlich zum körperlichen und seelischen Wohlbefinden bei** – und benötigen individuelle, alltagstaugliche Lösungen.

Ein Ratgeber für die Praxis

Mit diesem Ratgeber möchten wir Sie in Ihrer täglichen Arbeit gezielt unterstützen. Sie finden hier **praxiserprobte Ansätze** und **fundierte Wissen** rund um den Einsatz von Hilfsmittel für Transfer und Lagerung.

Kein Schema F – sondern gezielte Impulse

Unsere Hilfsmittel bieten Möglichkeiten, keine Patentrezepte. Dieser Ratgeber versteht sich daher nicht als Gebrauchsanweisung, sondern als Einladung:

- zum **Perspektivwechsel**,
- zur **gezielten Förderung von Ressourcen** und
- zur **gemeinsamen Bewegung in eine würdevolle, aktivierende Pflegepraxis**.



KUBIVENT PurplePos und PurpleTrans

Zwei Systeme – eine herausragende Wirkung!

Lila macht den Unterschied – für Ihre tägliche Arbeit und für Ihre zu pflegenden Personen. Die Farbe ist bewusst gewählt, denn sie wirkt beruhigend und unterstützt die Entspannung – ein wichtiger Aspekt in vielen Pflegesituationen.

Mit **KUBIVENT PurplePos** und **PurpleTrans** stehen Ihnen zwei Systeme zur Verfügung, die gemeinsam mit erfahrenen Professionellen aus Pflege und Therapie entwickelt wurden, mit dem Ziel: **Ihnen im anspruchsvollen Pflegealltag verlässliche, praxistaugliche Lösungen für Positionierung und Transfer an die Hand zu geben.**



Bei **PurplePos** kommen das Mikroperlen- und das Sandwich-System zum Einsatz. Das **Mikroperlen-System** mit kleinsten EPS-Perlen ermöglicht eine individuell modellierbare, formstabile Lagerung – **zur gezielten Druckentlastung, Bewegungsförderung und Unterstützung der Körperwahrnehmung.** Das **Sandwich-System** kombiniert einen stabilen PU-Schaum-Kern mit einer weichen Kaltschaum-Ummantelung und bietet so flexible Einsatzmöglichkeiten bei hoher Stabilität. Beide Systeme unterstützen eine sichere, stabile und druckentlastende Lagerung – angepasst an individuelle Pflegebedürfnisse. **Sie fördern Komfort, Mobilität und leisten einen aktiven Beitrag zur Dekubitusprophylaxe und Therapie.**



PurpleTrans-Transferhilfen ergänzen das System gezielt bei Mobilisation und Umlagerung. Sie decken alle gängigen Transferarten im Pflegealltag ab und lassen sich daher flexibel einsetzen. **Zum Einsatz kommen spezielle Materialien:** Gleitfähige Materialien, die Reibungswiderstände minimieren, sowie rutschsichere Materialien, die gezielt dort für Stabilität sorgen, wo sie gebraucht wird. **Das entlastet Sie als professionell Pflegende, ermöglicht sichere Bewegungen und unterstützt gleichzeitig die Eigenmobilität Ihrer zu pflegenden Personen** – ein wichtiger Beitrag zur Aktivierung, zur Sturzprävention und zum Erhalt der Selbstständigkeit.

Einsatz und Indikationen

Das Programm der **KUBIVENT** Positionierungs- und Transferhilfen kann für alle üblichen Unterstützungsarten im Pflegebereich eingesetzt werden:

- Verschiedene Positionierungsarten (30°, 45°, 90°, 120°, 135°)
- Mikropositionierung
- Bobath-Positionierung
- Positionierung von Kopf und Extremitäten
- Langsitz (*i.S. des aktiven, aufrechten Sitzens*)
- Nestchen-Positionierung
- Unterstützung bei Transfer und Umlagerung
- Mobilisation aus dem Liegen in den Sitz
- Positionswechsel im Rollstuhl
- uvm.

Natürlich sollte dabei immer das individuelle Krankheitsbild beachtet werden. Als mögliche Indikationen kommen z. B. in Betracht:

- Lähmungen
- Kontrakturen
- Spastiken
- Dekubitus
- Atemunterstützende Positionierungen
- Transfer- und Mobilisationsbedarf bei reduzierter Eigenaktivität oder eingeschränkter Beweglichkeit

Die neue Dimension der Positionierung

KUBIVENT VariMed

Das Positionierungskissen:

Hunderttausende feinsten Perlen schaffen eine bislang ungekannte individuelle Anpassung an den Körper – bei absoluter Formstabilität.

Durch die längliche Ausführung lassen sich die Kissen in individuelle Formen bringen. Durch das Mikroperlen-System im Inneren lässt sich die gewünschte Form stabilisieren.



zum Produkt



Vorteile der PurplePos Produkte

- Äußerst **geräuscharme** Füllung
- Kleinste Mikroperlen
(0,5-1,0 mm statt herkömmlicher 1,0-1,5 mm)
- Sehr gute Modulierbarkeit bei absoluter Formstabilität
- Kissen passen sich der Person an und nicht umgekehrt
- Wahrnehmungs-Förderung durch die bisher unerreichte individuelle Körperanpassung
- Bewegungsfähigkeit wird unterstützt
- Nur zwei – verformbare – Kissenformen statt einer Vielzahl vorgeformter Kissen
- Feinste Nahtstabilität
- Feinstes eingearbeitetes Sicherheitsnetz für die Füllung
- Desinfizierbarer Inko-Bezug



zum Produkt

KUBIVENT PhysiForm

Die quadratischen bzw. rechteckigen Universalkissen können je nach Bedarf für die individuelle Positionsunterstützung verwendet werden.

In drei Größen für die ganz persönliche und geräuscharme Positionierung der zu pflegenden Person.

KUBIVENT PhysiForm Kopfkissen

Das Kissen in der Größe 70x50 cm gibt es zusätzlich in einer speziellen Ausführung als Kopfkissen.

Mit seiner stärkeren Füllung eignet es sich vorrangig für die Lagerung des Kopfes, um eine Überdehnung des Nackens zu vermeiden.



zum Produkt



KUBIVENT Fersenschuh

Der **Fersenschuh** entlastet den Druck im Fersenbereich und unterstützt wirksam die Dekubitus-Prophylaxe und -Therapie.

Der Schuh wurde speziell zur Freilagerung der Ferse entwickelt. Dank der ergonomischen Form und der speziellen Polsterung wird die Belastung der Ferse reduziert und der Fuß optimal gelagert. Hunderttausende feinsten Mikroperlen schaffen eine bislang ungekannte individuelle Anpassung an den Fuß – bei hoher Formstabilität und angenehmen Tragegefühl.



KUBIVENT Handkissen

Individuell modellierbar durch seine Mikroperlen-Füllung, beispielsweise für die Positionierung der leicht geöffneten Hand.



Der abnehmbare Hygiene-Bezug über dem lila Inkobezug sorgt für den Abtransport von Schweiß, ist bei 60°C waschbar und schnell wieder einsetzbar. Die antibakterielle Wirkung des Bezuges wird durch das Antiseptikum Silber erreicht, das als Faden eingewebt ist. Der Silberanteil beträgt ca. 1%. **Bitte bei evtl. Silberallergie berücksichtigen.**

KUBIVENT Keil

So flexibel kann eine Positionierungshilfe sein! Überzeugend in Form und Wirkung. Geeignet zur Unterstützung bei der Mikro-lagerung. Der etwas stabilere Schaumstoff-Innenkern ist an jeder Seite mit einem weichen Kaltschaum ummantelt. Dadurch ist der Keil flexibel einsetzbar.



KUBIVENT Keilkissen XS

Zur zeitlich begrenzten Unterstützung von Bewegungsaktivitäten. Ebenso effizient bei der individuell unterstützenden Oberkörperpositionierung sowie zur Unterstützung der Beinpositionierung.



KUBIVENT Halbrolle

Optimal zur individuellen Positionsunterstützung der Beine. Durch die spezielle Schaumstoff-Kombination aus Kalt- und PU-Schaum wird eine angenehme Position mit der nötigen Stützkraft geschaffen.

Mehr Vielfalt ist ihre Stärke!

PurplePos Positionierungshilfen in der Anwendung

Es ist nicht notwendig, eine Vielzahl unterschiedlichster Positionierungshilfen für verschiedene Anwendungen zu haben, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Die speziell entwickelten Materialien bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten bei hoher Formstabilität. **Die bedürfnisorientierte, angepasste Lagerung kann den Alltag erheblich erleichtern.** PurplePos Kissen helfen dabei, den Körper stabil und sicher zu stützen und unterstützen bei der effektiven Vermeidung einer Vielzahl von Druckstellen.

Positionierung mit dem VariMed



A-Positionierung, liegend



U-Positionierung, liegend



A-Positionierung, sitzend



C-Positionierung, sitzend



Nestchen-Positionierung

Positionierung mit dem VariMed und PhysiForm



30°-Positionierung



45°-Positionierung



135°-Positionierung



Herz-Bett-Positionierung



Positionierung an der Bettkante



Sitzend im Bett



90°-Positionierung

Positionierung mit dem PhysiForm



30°-Positionierung



90°-Positionierung



Sitzen im Bett



Sitzen im Bett



Arm-Positionierung



Bein-Positionierung



Fuß-Positionierung



Fuß-Bein-Positionierung



Kopf-Positionierung



Arm-Positionierung im Rollstuhl

Positionierung mit der Halbrolle



Arm-Positionierung

Positionierung mit dem Keilkissen



Positionierung an der Bettkante



Minimale Positionierung
(Mikro-Positionierung) im Liegen



Minimale Positionierung
(Mikro-Positionierung) im Sitzen

Positionierung mit dem Keilkissen XS



Bein-Positionierung



Bewegungsfördernde Positionierungen mit dem KeilkissenXS



Positionierung mit dem Handkissen



Hand-Positionierung

Positionierung mit dem Fersenschuh



Fersenfreilagerung

Transfer und Mobilisation auf leichteste Art

KUBIVENT VarioSlide

VarioSlide ist ein dünner zweilagiger Endlos-schlauch aus äußerst gleitfähigem Material. Der Reibungswiderstand wird unter Belastung stark reduziert, so dass eine Mobilisierung bei minimalem Kraftaufwand gewährleistet ist.



zum Produkt



zum Produkt

KUBIVENT VarioSlide Glove

Der Gleithandschuh mit sehr geringem Reibungswiderstand dient dazu, die Hände leichter zwischen Matratze oder Sitzkissen und die zu pflegende Person schieben zu können. Sie helfen dabei, eine Faltenbildung bei Laken und Kleidung zu verhindern.

Vorteile der PurpleTrans Produkte

- Ideal für pflegende Angehörige und professionell Pflegende
- Für alle gängigen Transferarten geeignet
- Eigenmobilität kann unterstützt und gefördert werden
- Rücken- und kräfteschonende Anwendung
- Materialien, die die Gleitfähigkeit erhöhen, um Reibungswiderstand zu minimieren
- Materialien, die Rutschsicherheit vermittelt, wo sie benötigt wird



zum Produkt

KUBIVENT AntiSlide

Die Anti-Rutschmatte mit hohem Reibungswiderstand und flexiblem, abwaschbarem Material ist geeignet zur standsicheren Positionierung der Füße im Bett. Es verhindert ein Wegrutschen beim Abstützen und hält die Füße in der gewünschten Position.

KUBIVENT Move

Das **Move** besteht aus einem Unter- und Oberlaken. Das Laken hat eine 4-Richtungs-lösung, d.h. die Person kann in jede Richtung (*links, rechts, kopf- und fußwärts*) bewegt werden.

Der minimale Reibungswiderstand zwischen beiden Laken ermöglicht eine mühelose Bewegung mit geringem Kraftaufwand. Die Entstehung von Scherkräften kann unter sachgerechter Anwendung stark minimiert werden.



zum Produkt



zum Produkt



KUBIVENT Disk

Die **Disk** erleichtert den Transfer von Personen auf und von Stühle(n) sowie das Ein- und Aussteigen ins Auto. Dabei werden die Reibungswiderstände unter dem Gesäß beim Drehen minimiert.

KUBIVENT StopAndGo

Das **PurpleTrans StopAndGo** ist eine Stuhlaufgabe, die eine Bewegung nur in eine Richtung ermöglicht. Nach dem Transfer in die Sitzgelegenheit, kann die korrekte Sitzposition und/oder Sitzhaltung mit Hilfe des **StopAndGo** wieder korrigiert werden.



KUBIVENT StandUp

Das **StandUp** ist eine stabile Aufrichthilfe mit Haftstreifen die im Rücken- oder Gesäßbereich der zu pflegenden Person platziert wird.

Der professionell Pflegende wird beim Umsetzen von Personen vom/ins Bett, in den Rollstuhl und in anderen Sitzgelegenheiten unterstützt. Das **StandUp** kann durch seine flexible Form, die Bewegung der Beine im Bett zur Bettkante unterstützen.



KUBIVENT HoldUp

Der individuell verstellbare Umschnall-Gürtel unterstützt den Transfer und sichert das Umsetzen oder Aufrichten aus dem Bett oder aus Sitzgelegenheiten. Der Gürtel wird am professionell Pflegenden angelegt. Die zu pflegende Person kann sich – sofern die körperlichen Fähigkeiten es zulassen – an den Haltegriffen festhalten. In Kombination mit dem **StandUp** wird der Transfer gemeinsam mit dem professionell Pflegenden durchgeführt.

Stark im Transfer. Leicht im Einsatz!

PurpleTrans Transferhilfen in der Anwendung

Mobilisation und Positionswechsel gehören zum pflegerischen Alltag – und stellen professionell Pflegende wie zu pflegende Personen oft vor Herausforderungen.

PurpleTrans bietet hier eine zuverlässige Lösung, die Bewegungsabläufe erleichtert und gleichzeitig Stabilität vermittelt. Ob im Bett, beim Transfer in den Rollstuhl oder in der sitzenden Position.

Praktisch, entlastend und sicher – PurpleTrans unterstützt dort, wo es zählt.

Mobilisierung mit dem VarioSlide und dem AntiSlide



Bewegung im Bett an das Kopfende
(starke Einschränkungen)

Mobilisierung mit dem Move



Drehen auf die Seite



Bewegung im Bett zur Seite
(starke Einschränkungen)

Einsatz des AntiSlide Glove



Anwendung des AntiSlide Glove durch professionell Pflegende, um kaum merkbar im Rücken- und/oder Gesäßbereich zwischen zu pflegender Person und Matratze zu gleiten.

Mobilisierung mit der Disk und dem AntiSlide



Mobilisierung an die Bettkante
(aktive Personen)



Bewegung mit der Disk, dem AntiSlide und StandUp



Bewegung an die Bettkante
(semi-aktive Personen)



Bewegung und Umsetzen mit dem StandUp und HoldUp



Bewegung in den Stand



Transfer mit dem HoldUp



Umsetzen in den Rollstuhl



Anwendung des StopAndGo



Korrektur der Sitzposition



KUBIVENT macht Schule!

Was ist die PurpleSchool?



Die Belastung von professionell Pflegenden nimmt zu und das hohe Arbeitspensum hinterlässt Spuren. Deshalb gibt es die PurpleSchool. Sie gibt wertvolle Informationen, Tipps und Hilfestellungen für einen rundum entlastenden Einsatz unserer Hilfsmittel.

Was lernt man in der PurpleSchool?

Unsere Dozentinnen bringen langjährige Erfahrung in den Bereichen Pflege, Erwachsenenbildung, Bobath- sowie Ergo-Therapie mit und sind Expertinnen für Hilfsmittelprodukte. Unser professionelles Training in mehrstündig angelegten Praxis-Schulungen vermittelt verschiedene hilfreiche Inhalte für Sie als professionell Pflegenden:

- **Optimale Kenntnis der Funktionsweisen und Anwendungen ...**
denn nur wer die passenden Produkte sowie deren vielfältige Möglichkeiten in der Anwendung kennt, kann diese kräfteschonend und professionell zum Einsatz bringen.
- **Kräfteschonende und entlastende Techniken ...**
um professionell Pflegende und zu pflegende Personen im täglichen Einsatz unterstützen zu können!
- **Aktiv-praktische Strategien ...**
um professionell Pflegende bei einer rückenergonomischen Arbeitsweise zu unterstützen.



Schulungsdauer: 1,5 Stunden

Voraussetzung: höhenverstellbares Bett muss vorhanden sein

Termine, Preise und weitere Informationen zur **PurpleSchool** erhalten Sie unter: 07181 / 47 50 6-0 oder in Ihrem Sanitätshaus.

Die KUBIVENT YouTube Playlist



Beine aufstellen und stabilisieren



Fersenfreilagerung



Schrägposition (I)



Schrägposition (II)



90°-Seitenlage



135°-Seitenlage



Nestchenlagerung



Druckentlastung im Fersen- und Knöchelbereich



Bewegung im Bett zur Seite
(bei starker Einschränkung)



Spitzfuß



Kopfüberstreckung



Sitzen an der Bettkante



Aufstehen von der Bettkante
(Bewegungsübung)



Transfer vom Bett in den Rollstuhl



Aufrechtes Sitzen inaktiv (I)



Aufrechtes Sitzen inaktiv (II)



Aufrechtes Sitzen im Rollstuhl



Stabilisierung des geraden Sitzens im Rollstuhl
(bei halbseitiger Lähmung)



Bewegung im Bett von unten nach oben sowie inaktives, aufrechtes Sitzen
(bei starker Einschränkung)

... weitere Videos folgen!

Das Wichtigste auf einen Blick

Überblick über die PurplePos-Produkte

VariMed



Größe	HMV-Nr./PZN	Bestell-Nr.
250 x 35 cm	HMV-Nr.: 11.11.05.2006 PZN: 12548335	PKVM250-*
220 x 35 cm	HMV-Nr.: 11.11.05.2006 PZN: 12548329	PKVM220-*
180 x 35 cm	HMV-Nr.: 11.11.05.2006 PZN: 12548312	PKVM180-*
140 x 35 cm	HMV-Nr.: 11.11.05.2006	PKVM140-*

PhysiForm



70 x 50 cm	HMV-Nr.: 11.11.05.0033 PZN: 12548298	PKPF70-*
60 x 40 cm	HMV-Nr.: 11.11.05.0033 PZN: 12548447	PKPF60-*
40 x 40 cm	HMV-Nr.: 11.11.05.0033 PZN: 12548424	PKPF40-*

PhysiForm Kopfkissen



70 x 50 cm	HMV-Nr.: 11.11.05.0033 PZN: 12548306	PKPF70K-*
------------	---	-----------

Keil



25 x 20 x 10-1 cm	HMV-Nr.: 11.11.05.1026 PZN: 12548418	PKKL-*
-------------------	---	--------

KeilkissenXS



50 x 11 x 6 cm	HMV-Nr.: 11.11.05.0053 PZN: 12548341	PKXSK-*
----------------	---	---------

Halbrolle



Größe	HMV-Nr./PZN	Bestell-Nr.
25 x 12 x 7,5 cm	HMV-Nr.: 11.11.05.0052 PZN: 12548364	PKHR-*

Fersenschuh




25 x 24 x 14 cm	HMV-Nr.: 11.11.05.0030 PZN: 18714993	PKFS
-----------------	---	------

Handkissen



14 x 11 cm	PZN: 12548358	PKHK
------------	---------------	------

Baumwoll-Bezüge

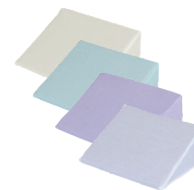

- Alle Positionierungskissen sind mit einem geschlossenen, vollvernähten Inko-Bezug (*lila*), ohne Reißverschluss ausgestattet.
- Für jede Positionierungshilfe (*außer Handkissen*) gibt es einen zusätzlichen Baumwollbezug in unterschiedlichen Farben mit verdecktem Reißverschluss. Ein Bezug in Ihrer Wunschfarbe ist im Standardlieferumfang enthalten.
- Alle Bezüge sind auch als Ersatzbezüge erhältlich.

*Für die gewünschte Farbe des Baumwollbezuges jeweils das entsprechende Kürzel an die Bestell-Nr. anfügen: -GR (*grün*) -GE (*gelb*) -LI (*lila*) -WE (*weiß*)

Das Wichtigste auf einen Blick

Überblick über die PurpleTrans-Produkte

VarioSlide



Größe	HMV-Nr./PZN	Bestell-Nr.
140 x 80 cm	HMV-Nr.: 22.29.01.2072 PZN: 16659474	THVS14080
100 x 80 cm	HMV-Nr.: 22.29.01.2072 PZN: 16659480	THVS10080

VarioSlide Glove



45 x 20 cm	PZN: 16659497	THVSG4520
------------	---------------	-----------

AntiSlide



48 x 31 cm	PZN: 16659505	THAS4831
------------	---------------	----------

Move



200 x 90 cm	HMV-Nr.: 22.29.01.7003 PZN: 16659540	THMO20090-*
200 x 100 cm	HMV-Nr.: 22.29.01.7003 PZN: 16659534	THMO200100-*

Als Zubehör erhältlich: Matratzen-Spannbettuch und zusätzl. Transferlaken

HoldUp



120 x 13 cm Hüftumfang max. 130 cm	HMV-Nr.: 22.29.01.2070 PZN: 17530570	THHU12013
--	---	-----------

StandUp



75 x 20 cm	HMV-Nr.: 22.29.01.2069 PZN: 16659468	THSU7520
------------	---	----------

StopAndGo



Größe	HMV-Nr./PZN	Bestell-Nr.
45 x 37 cm	HMV-Nr.: 22.29.01.2071 PZN: 16659451	THSG4537
40 x 37 cm	HMV-Nr.: 22.29.01.2071 PZN: 16659439	THSG4037

Disk




ø 39 cm	HMV-Nr.: 22.29.01.0024 PZN: 16659511	THDI39
---------	---	--------

*Für die gewünschte Farbe des Baumwollstoffes beim **Move** jeweils das entsprechende Kürzel an die Bestell-Nr. anfügen: LI (lila) -WE (weiß)

Das Wichtigste auf einen Blick


Überblick über die KUBIVENT Positionierungssets

Universal Positionierungsset 1 mit Tragetasche

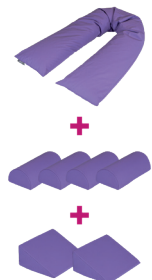


Inhalt	Bestell-Nr.
1 VariMed 250 x 35 cm 4 Halbrollen 2 Keile	PKSET

Universal Positionierungsset 2 mit Tragetasche

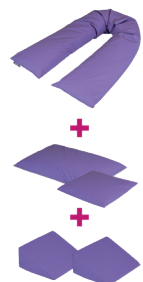


1 VariMed 220 x 35 cm 1 PhysiForm 60 x 40 cm 1 PhysiForm 40 x 40 cm 2 Keile	PKSET2
--	--------

Universal Positionierungsset 4 erhältlich in 3 Größen S / M / L mit Tragetasche

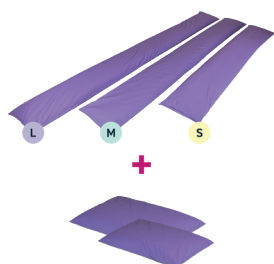


VariMed 180 x 35 cm 1 PhysiForm 60 x 40 cm 1 PhysiForm 70 x 50 cm	PKSET4S-GE
VariMed 220 x 35 cm 1 PhysiForm 60 x 40 cm 1 PhysiForm 70 x 50 cm	PKSET4M-GR
VariMed 240 x 35 cm 1 PhysiForm 60 x 40 cm 1 PhysiForm 70 x 50 cm	PKSET4L-LI

Positionierungsset für Spastiken und Kontrakturen erhältlich in 3 Größen S / M / L mit Tragetasche

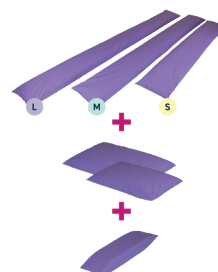

Inhalt	Bestell-Nr.
1 VariMed 180 x 35 cm 1 PhysiForm 60 x 40 cm 1 PhysiForm 70 x 50 cm 1 KeilkissenXS	PKSET7S-GE
1 VariMed 220 x 35 cm 1 PhysiForm 60 x 40 cm 1 PhysiForm 70 x 50 cm 1 KeilkissenXS	PKSET7M-GR
1 VariMed 250 x 35 cm 1 PhysiForm 60 x 40 cm 1 PhysiForm 70 x 50 cm 1 KeilkissenXS	PKSET7L-LI

Positionierungsset nach Bobath erhältlich in 3 Größen S / M / L mit Tragetasche

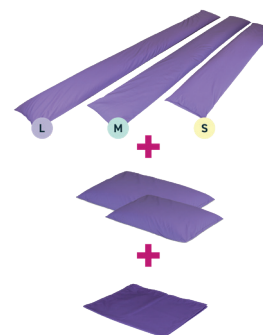

1 VariMed 180 x 35 cm 1 PhysiForm 60 x 40 cm 1 PhysiForm 70 x 50 cm 1 VarioSlide 100 x 80 cm	PKSET5S-GE
1 VariMed 220 x 35 cm 1 PhysiForm 60 x 40 cm 1 PhysiForm 70 x 50 cm 1 VarioSlide 100 x 80 cm	PKSET5M-GR
1 VariMed 250 x 35 cm 1 PhysiForm 60 x 40 cm 1 PhysiForm 70 x 50 cm 1 VarioSlide 100 x 80 cm	PKSET5L-LI
1 VariMed 180 x 35 cm 1 PhysiForm 60 x 40 cm 1 PhysiForm 70 x 50 cm 1 VarioSlide 140 x 80 cm	PKSET6S-GE
1 VariMed 220 x 35 cm 1 PhysiForm 60 x 40 cm 1 PhysiForm 70 x 50 cm 1 VarioSlide 140 x 80 cm	PKSET6M-GR
1 VariMed 250 x 35 cm 1 PhysiForm 60 x 40 cm 1 PhysiForm 70 x 50 cm 1 VarioSlide 140 x 80 cm	PKSET6L-LI



Kubivent Sitz- und Liegepolster GmbH • Robert-Bosch-Str. 8 • 73660 Urbach
Telefon: 071 81 / 47 50 6 - 0 • info@kubivent.com • kubivent.com



Folgen Sie uns!