

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Komponenten stellt Hygiene und Langlebigkeit der Positionierungskissen sicher. Zu beachten sind die nachfolgenden Hinweise und das entsprechende Waschetikett am Bezug. Grundsätzlich sind alle haushaltsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Reinigung und Desinfektion unserer Produkte geeignet.

Wir empfehlen die Verwendung milder, handelsüblicher Reinigungsmittel sowie VAH-gelisteter und materialverträglicher Flächendesinfektionsmittel, insbesondere alkoholbasierter Mittel (*z. B. Bacillol AF, Meliseptol® pure*).

Bei der Auswahl des Reinigungs- und Desinfektionsmittels ist zu beachten, dass kein Äthylenoxid, kein Formaldehyd und keine Phenole verwendet werden. Verwenden Sie auch keine Scheuermittel oder Mittel, die ätzende Substanzen, Säuren oder Bleiche enthalten, und keine Mittel auf Basis von Chlor, Aceton oder Benzol. Beachten Sie vor dem Einsatz die Sicherheits- und Anwendungshinweise des Reinigungs- und Desinfektionsmittelherstellers.

Dosieren Sie das Mittel nach dem Dosierplan, welcher auf dem Etikett oder in der Packungsbeilage des Herstellers angegeben ist.

Positionierungskissen:
Die Positionierungskissen sind für die Reinigung in der Waschmaschine nicht geeignet. Sie können mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einem milden, haushaltsüblichen Reinigungs-/Desinfektionsmittel abgewischt werden. Vor dem Einsatz sollte das Positionierungskissen vollständig trocknen.

Baumwollbezug:
Maschinenwäsche: Der Bezug kann bei 60 °C in der Waschmaschine gewaschen werden. Trocknen Sie die den Bezug im Anschluss an der Luft oder bei niedriger Temperatur im Wäschetrockner.

Desinfektion: Tragen Sie das Mittel mit einem Desinfektionstuch oder einer Sprühflasche gleichmäßig auf die Oberfläche auf. Lassen Sie das Produkt vollständig an der Luft trocknen. Nicht mit Wasser nachwischen. Alternativ kann die Desinfektion mit einem Desinfektionsvollwaschmittel in der Waschmaschine erfolgen.

Ausführliche Informationen zur Reinigung und Desinfektion finden Sie unter [kubivent.com](#).

WIEDEREINSATZ / PATIENTENWECHSEL

Die **KUBIVENT Positionierungshilfen** sind als Mehrpersonenprodukt ausgelegt. Ein Wiedereinsatz ist ausschließlich im institutionellen bzw. klinischen Bereich nach fachgerechter Aufbereitung zulässig. Vor einer erneuten Anwendung ist das Produkt nach den KRINKO-Empfehlungen und den Anforderungen des § 8 MPBetreibV fachgerecht aufzubereiten. Im Rahmen der patientenindividuellen Versorgung (*z. B. Abgabe auf ärztliche Verordnung*) ist der Wiedereinsatz der Positionierungshilfen bei anderen Personen nicht vorgesehen.

SICHERE ENTSORGUNG

Die Positionierungshilfen sind fachgerecht auf dem Sperrmüll oder einem Wertstoffhof zu entsorgen. Das Produkt hat keine physikalischen oder mikrobiologischen Gefahrenpotentiale, die bei der Entsorgung beachtet werden müssen.

SICHERHEITSHINWEIS

Alle Kissen mit dem standardmäßigen Inko-Schutzbezug sind brandschutzgeprüft nach DIN EN 597 1-2. Der Baumwoll- und der Hygiene-Bezug haben keine flammhemmende Ausrüstung. Rauchen und das Anwenden einer Flamquelle in unmittelbarer Nähe ist zu vermeiden.

LIEFERUMFANG

PurplePos Positionierungshilfe mit Baumwollbezug	PurplePos Positionierungshilfe ohne Baumwollbezug
1x KUBIVENT PurplePos Positionierungshilfe	1x KUBIVENT PurplePos Positionierungshilfe
1x Baumwollbezug (<i>optional</i>)	1x Gebrauchsanleitung
1x Gebrauchsanleitung	1x Folienverpackung
1x Folienverpackung	

KONSULTATION EINES ANGEHÖRIGEN
DER GESUNDHEITSBERUFE, MELDEPFLICHT

Wenn Ihnen die Anwendung des Produktes nicht geläufig ist und Sie beim Einsatz Hilfestellung benötigen, steht Ihnen unser Fachpersonal gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne.

Bei allergischen Reaktionen auf der Haut konsultieren Sie einen Arzt. Bitte beachten Sie, dass alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden sind. Schwerwiegende Vorfälle im Sinne des Gesetzes sind alle unerwünschten Ereignisse, die eine der nachstehenden Folgen hatten: Tod, lebensbedrohliche Erkrankung oder Verletzung, bleibende Körperschäden, chronische Erkrankungen oder fötale Gefährdung.

WARTUNG DURCH DEN ANWENDER

Grundsätzlich muss keine Wartung durch den Anwender durchgeführt werden.

HERSTELLUNG UND VERTRIEB

CE KUBIVENT **PurplePos** Positionierungshilfen werden ausschließlich von der Firma KUBIVENT Sitz- und Liegepolster GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben.

Die **PurplePos Positionierungshilfen** sind Medizinprodukte der Klasse I und als solche CE-gekennzeichnet.



POSITIONIERUNGSHILFEN

Gebrauchsanleitung
KUBIVENT PurplePos



Änderungen vorbehalten · Stand 03/2026 · AGB siehe [kubivent.com](#)



EINSATZBEREICHE UND ZWECKBESTIMMUNG

Die **KUBIVENT Positionierungshilfen** unterstützen im Rahmen eines ganzheitlichen Pflege- und Behandlungskonzeptes die Prophylaxe und Therapie bei Personen,

- mit bereits bestehenden Dekubitus und
- bei Personen, die durch dauerhaftes Liegen aufgrund von Krankheit oder Behinderung ein Dekubitus-Risiko haben.

Die Positionierungshilfen können zur Umpositionierung, Entlastung und Freilagerung angewendet werden. Die Körperwahrnehmung und das Wohlbefinden werden dabei positiv unterstützt. Die individuell einsetzbaren Hilfsmittel können für die im pflegerischen Bereich üblichen Positionsunterstützungsarten eingesetzt werden, beispielsweise für:

- Mikropositionierung,
- 30°-Seitenpositionierung,
- 130°-Seitenpositionierung,
- Bobath-Positionierung,
- Nestchen-Positionierung,
- Positionierung des Kopfes,
- Positionierung von Extremitäten,
- Langsitz und
- sonstige pflegerisch indizierte Positionierungsunterstützungen.

Grundsätzlich sollte der Einsatz der Positionierungshilfen individuell von geschultem Fachpersonal eingeschätzt werden.

INDIKATIONEN UND ZU ERWARTENDER KLINISCHER NUTZEN

Die Positionierungshilfen dienen bei Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition mit erheblich ausgeprägter Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/Druckgeschwür am Körperstamm/ Rücken/Extremitäten (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) und/oder drohender und manifester Druckschädigung der Haut und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) am Körperstamm/ Rücken/Extremitäten, wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist, zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses.¹

VERWENDUNG DES PRODUKTES IN BETTEN MIT VERSTELLBARER LIEGEFLÄCHE

Beim Verstellen der Liegefläche können Körperteile oder Gegenstände zwischen Matratze und Bettmechanik eingeklemmt werden. Stellen Sie sicher, dass keine Körperteile oder Objekte im Spaltbereich liegen. Achten Sie darauf, dass Kissen die Atemwege nicht blockieren. Bei Betten mit Seitengittern müssen diese korrekt eingestellt sein, damit sich die Person nicht verletzt oder aus dem Bett fallen kann.

ANWENDUNGSRISIKEN UND KONTRAINDIKATIONEN

Derzeit sind keine Kontraindikationen bekannt. Anwender sollten mögliche individuelle Risiken berücksichtigen.

MONTAGEHINWEIS

Variante mit Baumwollbezug: Vor der Anwendung ist der mitgelieferte Baumwollbezug über das Positionierungskissen zu ziehen. Er hilft, Feuchtigkeitstau zu vermeiden und unterstützt ein angenehmes, hautfreundliches Mikroklima.

Variante ohne Baumwollbezug: Das Produkt ist vollständig montiert und kann nach dem Auspacken sofort verwendet werden.

SACHGERECHTE ANWENDUNG

Ausführliche Informationen zur Anwendung der **KUBIVENT Positionierungshilfen** finden Sie in den **KUBIVENT PurplePos** Produktvideos auf Youtube.

Kissen VariMed

Durch die längliche Ausführung lassen sich die Kissen in verschiedene individuelle Formen bringen. Die Füllung kann zusätzlich bequem und einfach durch kreisende Handbewegung verteilt werden.

Durch die feinen Mikroperlen im Inneren lässt sich die gewünschte Form stabilisieren. Je nach Bedarf kann das Kissen für die individuelle Positionsunterstützung angewandt werden.




Kissen PhysiForm

Quadratische bzw. rechteckige Universalkissen. Je nach Bedarf für die individuelle Positionsunterstützung anzuwenden. Das Kissen in der Größe 70 x 50 cm gibt es zusätzlich in einer speziellen Ausführung. Mit seiner stärkeren Füllung eignet es sich vorrangig für die Lagerung des Kopfes, um eine Überdehnung des Nackens zu vermeiden. Optisches Unterscheidungsmerkmal: Weißer Bezug.



Halbrolle

Optimal für die Fersenfreilagerung und zur individuellen Positions-Unterstützung der Beine. Durch die spezielle Schaumstoff-Kombination aus Kalt- und PU-Schaum wird eine angenehme Position mit der nötigen Stützkraft geschaffen.

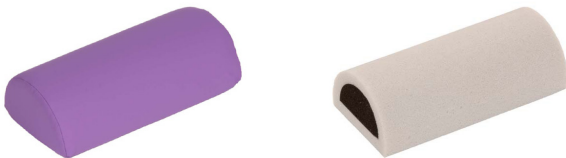


Keil

Geeignet zur Mikrolagerung. Der etwas stabilere Schaumstoff-Innenkern wurde an jeder Seite mit einem weicheren Kaltschaum ummantelt. Dadurch ist der Keil flexibel einsetzbar.



Keilkissen XS

Empfeht sich zur zeitlich begrenzten Unterstützung von Bewegungsaktivitäten. Zur Druckentlastung oder Freilagerung an schwer zugänglichen Bereichen der Beine, z.B. bei Kontrakturen.

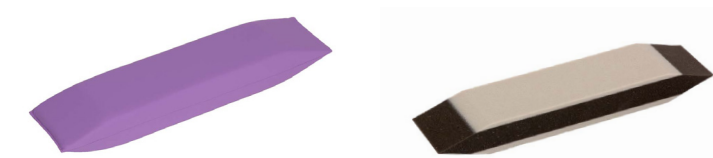

Handkissen

Durch die Mikroperlen-Füllung individuell modellierbar. Eignet sich optimal für die Positionierung der leicht geöffneten Hand. Der abnehmbare Hygiene-Bezug sorgt für den Abtransport von Schweiß, ist bei 60°C waschbar und schnell wieder einsetzbar.



TECHNISCHE DATEN

Größen und Gewichte						
Produkt	Größe in cm (L x B x H)	Gewicht in g	Hilfsmittel-Nr.	PZN	Artikel-Nr.	Baumwollbezug
VariMed	140 x 35 x 10	1050	11.11.05.2006	-	PKVM140	BPKVM140-BW
VariMed	180 x 35 x 10	1500	11.11.05.2006	12548312	PKVM180	BPKVM180-BW
VariMed	220 x 35 x 10	1850	11.11.05.2006	12548329	PKVM220	BPKVM220-BW
VariMed	250 x 35 x 10	2130	11.11.05.2006	12548335	PKVM250	BPKVM250-BW
PhysiForm	40 x 40 x 10	300	11.11.05.0033	12548424	PKPF40	BPKPF40-BW
PhysiForm	60 x 40 x 10	520	11.11.05.0033	12548447	PKPF60	BPKPF60-BW
PhysiForm	70 x 50 x 10	880	11.11.05.0033	12548298	PKPF70	BPKPF70-BW
PhysiForm Kopfkissen	70 x 50 x 15	1005	11.11.05.0033	12548306	PKPF70K	BPKPF70-BW
Handkissen	14 x 11 x 5	14	-	12548358	PKHK	Hygiene-Bezug
Keil	25 x 20 x 10-1	240	11.11.05.1026	12548418	PKKL	BPKKL-BW
Halbrolle	25 x 12 x 7,5	150	11.11.05.1024	12548364	PKHR	BPKHR-BW
KeilkissenXS	50 x 11 x 6	270	11.11.05.1025	12548341	PKXSK	BPKXSK-BW

Verwendete Materialien		Bezüge	
VariMed PhysiForm Handkissen	vollvernähtes Polyestergewebe mit EPS-Mikroperlenfüllung	Inkontinenz-schutzbezug	vollvernähtes PU-beschichtetetes Polyestergewebe
Keil Keilkissen XS	Kaltschaumstoff: Raumgewicht 55 kg/m³, Stauchhärte 4,2 kPa PU-Schaumstoff, Raumgewicht 60 kg/m³, Stauchhärte 7,0 kPa	Baumwollbezug	100 % Baumwolle
Halbrolle	Kaltschaumstoff: Raumgewicht 55 kg/m³, Stauchhärte 2,5 kPa PU-Schaumstoff, Raumgewicht 60 kg/m³, Stauchhärte 7,0 kPa	Hygiene-Bezug	Anti-Allergiebezug aus Baumwollmischgewebe